

Эластомерные слепочные материалы PERFIT

Порядок работы со слепочной массой и корригирующей массой PERFIT

1 Возьмите подходящую оттисковую ложку

- Борта ложки должны отстоять на 3-4 мм от зубов пациента.
- Рекомендуется использовать ложку из нержавеющей стали, т.к. она меньше поддается деформации.



2 Вымойте и высушите руки

- Избегайте попадания прямых солнечных лучей, рекомендуемая температура хранения - ниже 25°C при нормальной влажности в помещении.
- Во время процедуры не следует надевать латексные перчатки и трогать какие-либо косметические средства или другие посторонние материалы, например, тальк и т.п. Рекомендуется использовать одноразовые полиэтиленовые перчатки.
- Перед началом снятия оттиска пациент должен несколько раз ополоснуть ротовую полость.



3 Снимите первый оттиск.

- С помощью мерных ложечек наберите основу и катализатор соответствующих оттенков. Для верхней челюсти рекомендуется использовать по одной ложке с горкой каждого материала; для нижней челюсти рекомендуется набирать по одной ложке без горки каждого материала. Убедитесь, что пропорции основы и катализатора составляют 1:1.
- Кончиком пальца смешайте материалы, пока цвет не станет однородным. Рекомендуемое время смешивания - 30 секунд.
- Наберите массу на шпатель и нанесите на ложку, вставьте ложку в рот пациента. Через 3 минуты выньте ложку. Первый оттиск снят.



4 Откорректируйте первый оттиск.

- Используйте силиконовый нож PERFIT для удаления уступов, межзубных сосочков, устранения поднутрений в межзубных промежутках, формирования промывного пространства.
- Примечания: Время отвердевания дополнительного поливинилсилоксанового силикона в значительной мере зависит от температуры. Отвердевание происходит быстрее при более высоких температурах.



5 Приготовьтесь делать второй оттиск.

- Первые 1-2 см корригирующей массы из био-картриджа рекомендуется выбросить, т.к. они могут отрицательно сказаться на затвердевании из-за неравномерности структуры.
- Колпачок после первого вскрытия картриджа рекомендуется выбросить; после того, как второй оттиск снят, в качестве крышки можно использовать смесительную насадку.



6 Выдавите корригирующую массу.

- Сначала выдавите корригирующую массу в слепочную ложку. При выдавливании убедитесь, что смесительная насадка достаточно погружена в слепочный материал во избежание формирования пузырьков.
- Затем выдавите корригирующую жидкость в ротовую полость пациента. При нанесении отодвигайте пришеечную часть десны и следите за тем, чтобы кончик дозатора был постоянно погружен в материал.



7 Сделайте второй оттиск.

- Вставьте оттисковую ложку в корригирующей массой в ротовую полость пациента, медленно, одним точным движением установите ее на место. Примерно через 3 минуты и 30 секунд, когда материал полностью затвердеет, ложку можно вынуть.
- После этого оставьте слепок на 30 минут (слепок может храниться длительное время - до 30 дней), затем промойте для дезинфекции.

