

one time perfect putty

Высокоточный слепочный А-силикон
очень высокая вязкость – базовый – быстрое отверждение



рис. 1

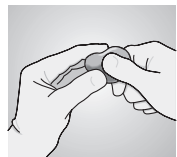


рис. 2



рис. 3



рис. 4



рис. 5

1. Подготовка оттисковой ложки

Выбрать подходящую оттисковую ложку в соответствии с применяемой техникой выполнения слепка (индивидуальную или готовую ложку из металла или твердой пластмассы). Чтобы избежать продавливания оттиска, в не очень значимых областях слепка поместить на ложку ограничители из воска или светоотверждаемой пластмассы. Для оптимального сцепления рекомендуем на все ложки наносить тонкий слой **trayloc® A** (рис. 1). Оставить просохнуть на 3 минут.

2. Смешивание и дозирование

Дозирование выполняется в соотношении смеси 1:1 с помощью прилагаемых дозировочных ложек. Смешивание выполняется путем перемешивания массы вручную до получения однородной смеси ровного цвета (рис. 2).

3. Сендвич-техника

Сначала нанести замешанный **onetime perfect putty** на слепочную ложку и четко сформовать в области зубного в виде лотка (рис. 3). Для технике смешивания возникшее углубление затем заполняется жгутом **onetime perfect wash** (рис. 4). После размещения материала **onetime perfect wash** в полости рта заполненную ложку можно легким нажатием в течение 3-4 секунд установить в нужное положение во рту пациента. До отверждения **onetime perfect** зафиксировать слепок, не создавая давления на него (рис. 5).

4. Дезинфекция

Оттиск после удаления из ротовой полости промыть под проточной тепловатой водой. Последующую дезинфекцию можно выполнить в течение 15 минут в 2%-ном глутаральдегиде.

5. Изготовление модели

Оттиск нельзя заливать до истечения 30 минут. Стабильность размеров гарантирована в течение 14 дней. Рекомендуемые материалы для моделей - дентальные гипсы классов III и IV, а также имеющиеся в продаже пластмассы для моделей.

6. Очистка ложек

Затвердевший материал удалить механическим путем с помощью тупого инструмента. При помещении в ацетон или схожий растворитель **trayloc® A** растворяется. Использовать только в проветриваемых помещениях. Затем ложку промыть и дезинфицировать обычным образом.


Важные указания по применению

- Растворы, используемые перед выполнением оттиска (например, ретракционные), могут влиять на реакцию схватывания и поэтому их необходимо полностью удалить.
- Не использовать вместе с конденсационными силиконами (К-силиконами).
- Перчатки из латекса могут влиять на твердение **onetime perfect**
- Полимерные слепочные массы химически устойчивы – избегать пятен на одежде.
- Не оставлять во рту никаких остатков слепочного материала.
- В качестве корректирующего материала или материала рекомендуем использовать **onetime perfect wash**

Дополнительная информация:

Материалы на основе силикона тестировались много раз. При условии соблюдения инструкции по применению непредвиденные осложнения маловероятны. Однако, некоторые реакции иммунной системы человека, такие как аллергия, индивидуальная непереносимость отдельных компонентов материала, не могут быть абсолютно исключены. В сомнительных случаях мы рекомендуем пройти тест на аллергию перед применением материала.

Для использования обученными специалистами.

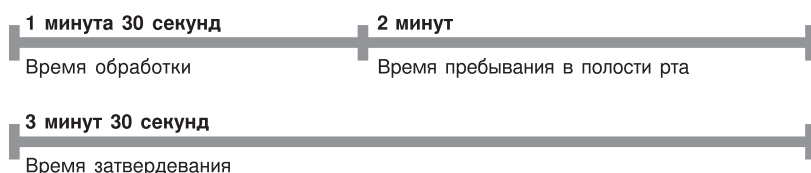

P

Инструкция по применению

Области применения

- Снятие слепков сендвич-техники и методикой двойного смешивания
- Изготовление коронок/мостовидных протезов
- Полуколонки/виниры

Технические характеристики:

DIN EN ISO 4823 - тип 0

■ **Смешиваемый объем:**

2 x 250 мл (банки)

■ **Дозирование: 1:1**

■ **Цвет продукта:**

база: бирюзовый

катализатор: белый

■ **Время смешивания:**

Около 30 секунд

■ **Рабочее время:**

Около 1 минута

30 секунд*

■ **Время схватывания:**

Около 3 минут

30 секунд*

■ **Время пребывания во рту:** Около 2 минут

■ **Деформация под давлением:** < 3 %

■ **Возвращение в исходное состояние после деформации:**

> 99,8 %

■ **Линейное изменение размеров:** < 0,2 %

■ **Условия работы:**

При 23 °C ± 2 °C, 50 ±

5% относительная

влажность воздуха

■ **Хранение:**

15 °C

25 °C

59 °F

77 °F

с начала смешивания при 23 °C ±

2 °C, 50 ± 5 % относительной

влажности воздуха. Более высокие

температуры сокращают, а более

низкие удлиняют указанное время.

Информация для заказа:

onetime perfect

Стартовый набор 02619

база + катализатор

по 250 мл

2 картриджа

корректирующего

слоя по 50 мл

2 мерных ложки

12 смешительных

канюль, розовых

12 внутриротовых

насадок, белых

10 одноразовых

слепочных шприцов

1 инструкция по

эксплуатации

onetime perfect putty

Экономичный набор 02155

8 банок по 250 мл

2 мерных ложки

onetime perfect wash

Экономичный

набор 02152

8 картриджей по 50 мл

48 смешительных канюль,

розовых

48 внутриротовых

насадок, белых

trayloc A 03098

17 мл бутылочка с

кисточкой