


LM

feel the
difference

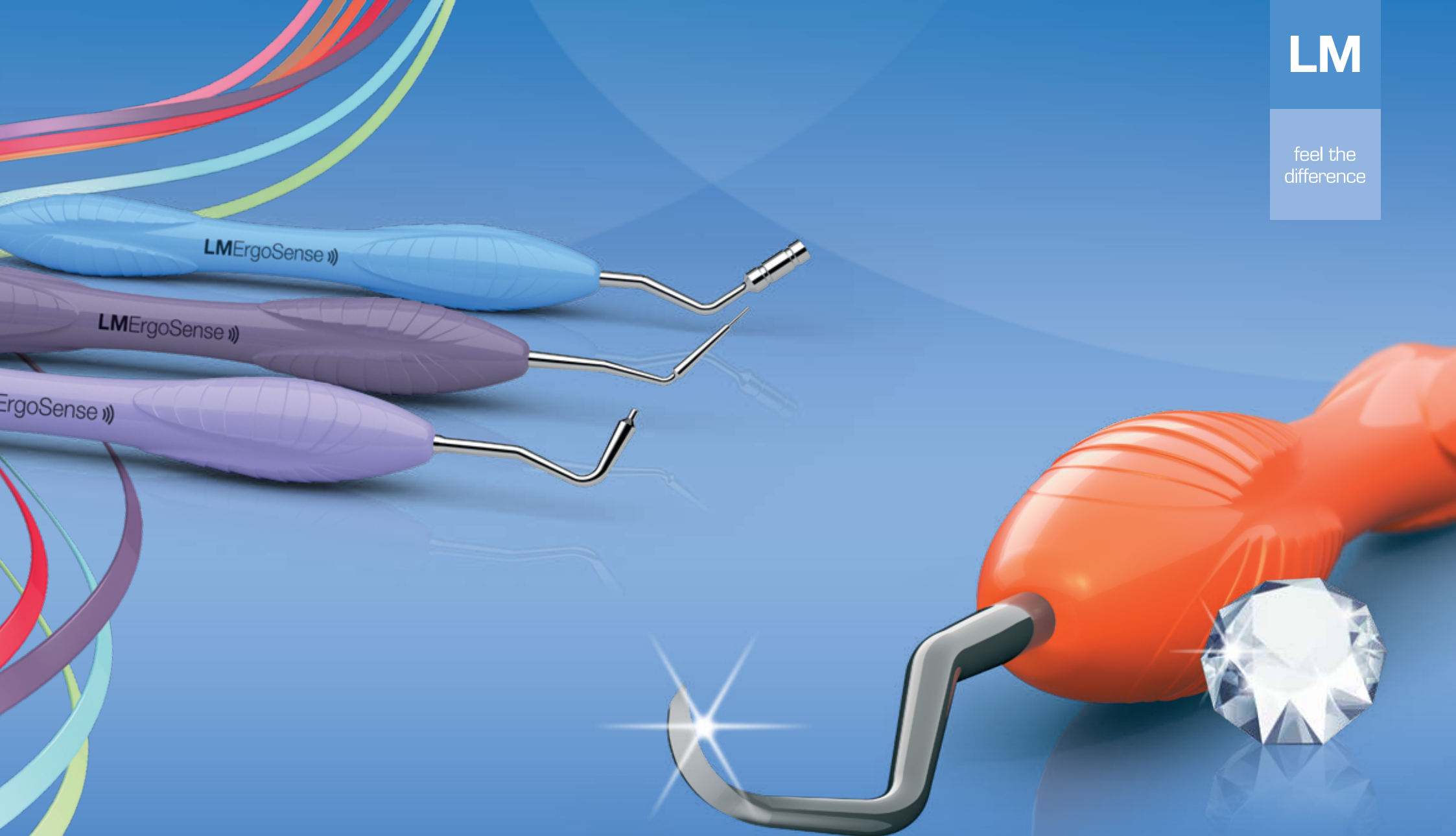

LMDental
каталог

LM

feel the
difference

Мы оставляем за собой право вносить любые изменения.

Ваши таланты достойны LM

Как в дизайне, так и в производстве ручных инструментов LM, мы ориентируемся на нужды профессионалов в области стоматологии. Мы поддерживаем постоянный контакт с конечными потребителями, чтобы наши инструменты всегда оставались востребованными. Мы - лидер, которого копируют остальные. Наши лозунги в 80-х - тонкая ручка, оптимальная форма, эластичная поверхность, легкость и цветовая кодировка, - стали стандартом на рынке в 21 веке.

С самого основания компании эргономика была отправной точкой для наших разработок. Сейчас, основываясь на последних исследованиях, мы знаем больше, чем когда-либо, об эргономике инструментов. Воплощением этих знаний стала новая ручка LM-ErgoSense - икона стоматологии будущего.

В дополнение к улучшенной эргономике, LM-ErgoSense предлагают новые возможности благодаря интеграции RFID-технологии, которая вместе со сканером и программным обеспечением создает уникальную Систему контроля.

Вы почувствуете разницу, используя наши технологии, а ваши пациенты получат удовольствие от лечения.

PLANMECA

LM-Dental - часть холдинга Planmeca Group, одного из лидеров в производстве стоматологического оборудования
www.planmeca.com

4 LM-DENTAL

О компании LM-Dental | LM-ErgoSense & Система контроля | Варианты ручек | Гарантия

10 ДИАГНОСТИКА

Ручки для зеркал | Зонды | Зонды пародонтологические | Зонды для фуркации | Набор

16 ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Скейлеры | Универсальные кюреты | Инструменты Sharp Dimond | Специальные инструменты
Кюреты Грейси | Инструменты со сменными насадками LM-ErgoMix | Наборы | Ручка для скальпеля

35 РЕСТАВРАЦИЯ

Инструменты для подготовки полости и размещения материала | Инструменты для конденсации и послойной техники реставрации | Инструменты для удаления излишков материала | Инструменты для удержания и удаления коронок | Дополнительные инструменты | Наборы | Dark Diamond

51 ЭНДОДОНТИЯ

Зонд | Экскаваторы | Эндоплаггеры | Хирургическая эндодонтия

52 ИМПЛАНТАЦИЯ

Инструменты для позиционирования имплантатов

54 ХИРУРГИЯ

Элеваторы | Люксаторы | Инструменты для удаления обломков корней

57 ОРТОДОНТИЯ

Съемные аппараты | Ортодонтические ручные инструменты

68 ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ

Система хранения LM-ServoMax tray | Кодовые кольца и кнопки | Машинка для заточки инструментов LM-RondoPlus | Система DTS | Инструкция по уходу за инструментами

Первые В ЭРГОНОМИКЕ ИНСТРУМЕНТОВ

Из чего складывается понятие "эргономичность" для ручных инструментов? Во-первых, натуральный материал ручки, который не скользит в руках специалиста. Во-вторых, легкий вес и оптимальный дизайн, которые предотвращают появление профессиональных заболеваний. В-третьих, хорошая тактильность и управляемость для достижения наилучших клинических результатов. Кроме того надежность, прочность и комфорт, важные как для врача, так и для пациента. Это были основные принципы, которыми руководствовался Пекка Кангасниemi (Pekka Kangasniemi), DDS, один из основателей LM, определяя понятие "эргономичность" еще в 80-х годах.

До сих пор наша цель - это разработка инновационных продуктов вместе со специалистами в стоматологии. Благодаря научным исследованиям, мы сейчас знаем больше, чем когда-либо об эргономике инструментов. Результатом нашей работы стали ручки LM-ErgoSense, которые идеально лежат в руке и обеспечивают комфортный захват и высокую тактильную чувствительность.

Современные покрытия - новые преимущества

Благодаря современным технологиям нанесения покрытий, мы можем добавлять дополнительные функции в наши инструменты, предлагая уникальные преимущества. Инструменты для пародонтологии не требующие заточки и терапевтические инструменты к которым совсем не прилипает материал теперь реальность.

Затачивать или нет?

Вопрос о том, затачивать инструменты или нет, всегда обсуждался специалистами в области пародонтологии. Для обоих случаев подходят инструменты LM, которые являются лидерами по качеству металла. Высокая износостойкость и жесткость лезвий делает работу ими эффективной и комфортной, а сами инструменты прослужат вам долгое время.

Благодаря продвинутому исследованию технологий производства материалов и использованию технологии микро-мембранного покрытия LM может предложить качественные инструменты, как с покрытием, так и без.

Не требуют заточки - покрытие Sharp Diamond

Можно затачивать - сталь LM-DuraGradeMAX.

Выбор за вами!

Эргономичные материал инструмента

- комфортная нескользящая ручка

Особый сплав металлического стержня

- безопасное использование с приложением силы и легкий вес

Оптимальная жесткость

- точность и эффективность работы
- устойчивость к коррозии

Финишная ручная заточка

- острые режущие грани

Точные формы рабочих частей

- экстремально острые,
гладкие режущие поверхности

Высокотехнологичное производство

Как любой профессионал, мы стремимся к идеалу в своей работе. Весь процесс разработки и производства компании LM направлен на обеспечение максимально возможного качества всех наших продуктов, чтобы вы пользовались лучшими инструментами и гарантированно получали наилучшие результаты при лечении пациентов. Все наши инструменты и аппараты произведены в Скандинавии. Высокотехнологичный процесс производства инструментов завершается ручной финишной доработкой для достижения максимального качества и функциональности.

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

LM-DuraGradeMAX супер-сталь


- Высокая износостойкость
- Устойчивость к коррозии
- Может повторно затачиваться

С ПОКРЫТИЕМ

ПОКРЫТИЕ DARK DIAMOND

- Для терапевтических инструментов
- Максимально твердая и гладкая поверхность
- Материал абсолютно не прилипает к покрытию
- Черный цвет для максимального контраста

НЕ ПРИЛИПАЕТ МАТЕРИАЛ

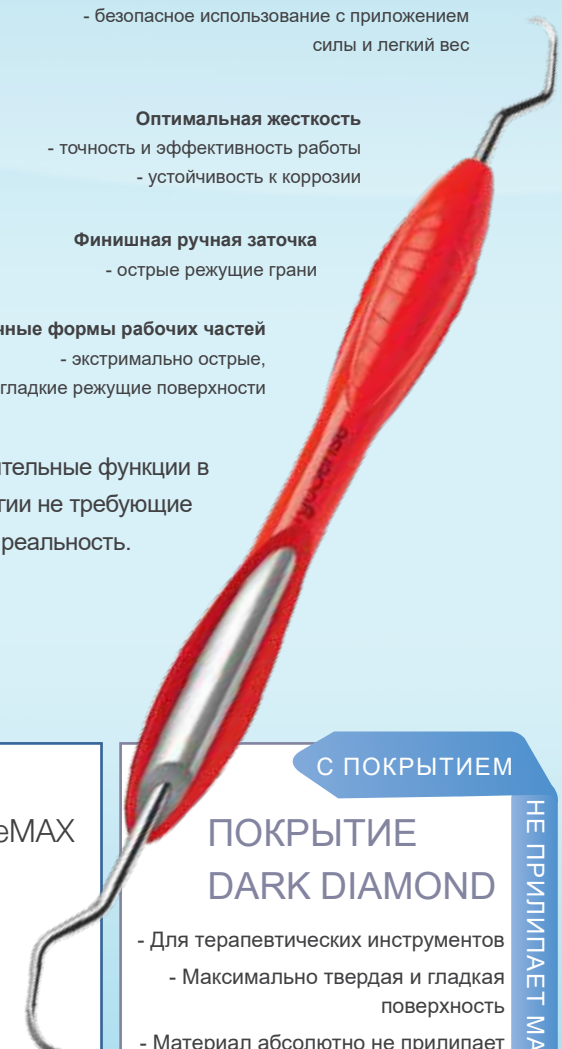

Наслаждайтесь работой без заточки

Противоположности притягиваются. Это справедливо для качественных пародонтологических инструментов. В идеале они должны быть острые, как бритва, очень жесткие, но при этом гладкие и легкие. Новое микро-мембранное покрытие, нанесенное с помощью самых современных технологий (Physical Vapor Deposition (PVD)) позволило LM создать инструменты Sharp Diamond - инструменты с оптимальной комбинацией всех перечисленных качеств. Инструменты Sharp Diamonds не нужно затачивать, они жесткие, но легкие и изысканные. Sharp Diamond сочетают уникальные преимущества для вас и ваших пациентов.

“Это здорово, что мне больше не нужно тратить время на заточку! Благодаря инструментам Sharp Diamond я могу полностью сконцентрироваться на клиническом приеме. Даже пациенты заметили, что инструменты более приятные и тихие в работе. Я могу удалять зубные отложения точно контролируемые движениями с меньшим нажимом. Я действительно чувствую разницу, работая постоянно острым инструментом!”

Анна, сертифицированный гигиенист стоматологический, США



С ПОКРЫТИЕМ

SHARP DIAMOND заточка не нужна!

- Микро-мембранное покрытие для пародонтологических инструментов нанесенное с помощью продвинутых технологий PVD (Physical Vapor Deposition)
- Заточка не требуется
- Долго остаются острыми
- Максимальная износостойкость

НЕ ТРЕБУЕТ ЗАТОЧКИ



Режущая грань кюреты Sharp Diamond и увеличение под микроскопом после тестов.



Режущая грань обычной кюреты без покрытия и увеличение под микроскопом после тестов


ВСЕГДА ОСТРЫЕ

МИКРО ПОКРЫТИЕ НЕ ТРЕБУЮЩЕЕ ЗАТОЧКИ

Вы почувствуете лучший контроль и эффективность, просто “сбривая” зубные отложения, а не откалывая их.

Экономия времени и денег

Улучшенная эргономика ручки

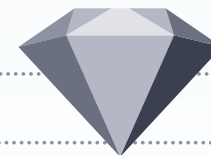

Очень долго остаются острыми

Лучшие клинические результаты

ХАРАКТЕРИСТИКИ SHARP DIAMOND



Не требуется заточка	◆◆◆◆◆
Превосходная острота	◆◆◆◆◆
Улучшенная эргономика	◆◆◆◆◆
Минимум обслуживания	◆◆◆◆

ПРОЧНОСТЬ

Прочность продлевает срок службы инструмента. Инструменты Sharp Diamond получили характеристику прочности 63 по шкале Роквелла (Rockwell scale).



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**

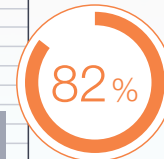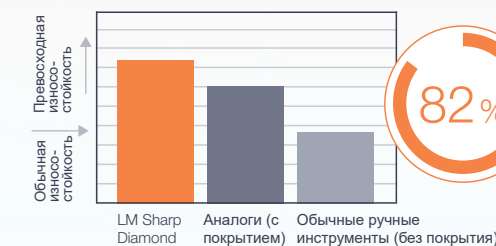

Уменьшение износа по сравнению со стандартными материалами ручных инструментов

Ссылки на исследования: * (1) Sormunen E., Nevala N: Evaluation of ergonomics and usability of dental scaling instruments; Dental scaling simulation and Field study, part III. Finnish Institute of Occupational Health, LM-Instruments Oy. (2) Nevala N, Sormunen E, Remes J, Suomalainen K: Ergonomic and productivity evaluation of scaling instruments in dentistry. The Ergonomics Open Journal 2013; 6, 6-12. ** Leppänen J. et al: The influence of PVD coatings on the wear performance of steel dental currettes. Key Engineering Materials Vol. 674 (2016), 289-295.

LM ErgoSense

Новые эргономичные инструменты

СЕНСАЦИОННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Сейчас основное внимание уделяется эргономике, но не в ущерб эффективности инструментов. Новые инструменты LM-ErgoSense соответствуют обоим требованиям, сочетая в себе эргономичный дизайн и новейшие интеллектуальные технологии. Эти инструменты - результат сложных исследований и длительного процесса разработки совместно с профессионалами в области стоматологии.

Эргономичные, высококачественные инструменты действительно хорошо ощущаются в руке. Это настоящая сенсационная новинка на рынке ручных стоматологических инструментов.

Лучшие результаты по итогам тестирования ручных инструментов

Настоящую ценность эргономики инструмента трудно переоценить, как показали результаты нескольких научных исследований.

Ручные инструменты с толстой силиконовой ручкой были признаны наиболее удобными из-за меньшего напряжения опорно-двигательного аппарата, по сравнению с инструментами с тонкими ручками (1). LM-ErgoSense получили наивысшие баллы по 10 из 14 пользовательским критериям, по сравнению с другими производителями, во время скейлинга на фантомах (1).

Они также получили оценку как “Лучший инструмент”.

Большинство участников аутентичного исследования инструментов для скейлинга признали силиконовую ручку LM-ErgoSense своим фаворитом благодаря улучшенному сцеплению, комфорту и функциональному дизайну. Оценки участников были основаны на их ощущениях при использовании LM-ErgoSense в реальной клинической работе. В другом исследовании, сфокусированном на эргономике, юзабилити и эффективности ручных инструментов разных производителей, толстая ручка с силиконовым покрытием компании LM получила наивысшие результаты по 18 пунктам теста (2).



История LM-ErgoSense

Ссылки на исследования:

(1) Sormunen E., Nevala N: Evaluation of ergonomics and usability of dental scaling instruments; Dental scaling simulation and Field study, part III. Finnish Institute of Occupational Health, LM-Instruments Oy.

(2) Nevala N, Sormunen E, Remes J, Suomalainen K: Ergonomic and productivity evaluation of scaling instruments in dentistry. The Ergonomics Open Journal 2013; 6, 6-12.



“Исключительное
удобство работы”

Великолепная тактильная чувствительность

Большой диаметр и
оптимальный дизайн

Уникальная интеллектуальная
технология RFID

LM все больше развивает идею об эргономичности инструментов. Теперь в инструменты может быть встроен специальный RFID-чип, позволяющий полностью отслеживать цикл использования инструмента. Дополнительные данные обеспечивают большую безопасность пациентам и сокращают расходы клиники.

Высший рейтинг после
клинического тестирования

LM Dental Tracking System™

Интеллектуальная система для клиник:
УЛУЧШАЕТ КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ



Совместная работа со стоматологическими клиниками выявила много трудностей в учете материалов и инструментов. Как контролировать и улучшать логистику и документооборот и соответствовать всевозрастающим требованиям к безопасности пациентов? Для решения этих задач компания LM предложила идею по созданию “умного инструмента”.

RFID-чип может быть интегрирован в инструменты с ручкой LM-ErgoSense позволяя отслеживать все манипуляции с инструментом с помощью сканирования специальным ридером на котором установлено уникальное программное обеспечение. Чип, ридер и программное обеспечение вместе создают уникальную систему учета Dental Tracking System. Информация, полученная со сканера, поможет улучшить менеджмент и повысить экономическую эффективность использования инструментов. Система учета Dental Tracking System поможет вам быть уверенными, что к пациентам попадают только безопасные инструменты, прошедшие стерилизацию.

Ключевые преимущества



Безопасность пациентов
- Безопасные материалы
- Контроль стерилизации
- Проверенные данные



Сокращение расходов
- Уменьшение контроля “вручную”
- Снижение объемов склада
- Эффективное использование
закупаемых материалов



Эффективный менеджмент
- Контроль использования ресурсов
- Отслеживание спроса
- Тайм-менеджмент



Качественный документооборот
- Снижение рисков
- Уменьшение потерь
- Обучение персонала
- Планирование приема пациентов



Подробнее на www.dentaltracking.com

Выбор ручки инструмента

Выбор правильной и наиболее эргономичной ручки инструмента может сыграть существенную роль в комфорте и безопасности работы стоматолога. Нельзя не учитывать такие характеристики как диаметр ручки или качество материала. Когда вы держите инструмент примерно 2000 часов в год, дизайн, вес и ощущение от инструмента становятся действительно важными, так как эти характеристики могут оказать влияние на эффективность вашей работы.

Инструменты LM доступны с разными типами ручек. Все ручки исключительно эргономичны благодаря эластичному силиконовому покрытию и оптимальной форме. Самым важным в выборе идеального инструмента является ощущение специалиста, который будет им работать. Смена различных типов ручек может еще больше уменьшить нагрузку.



i Новые цвета, названия и кодировка

Для улучшения цветовой кодировки и рабочего процесса инструменты LM-ErgoSense, LM-ErgoMax и LM-ErgoNorm теперь выпускаются в обновленных цветах. Название и цветовая кодировка облегчают идентификацию инструмента во время клинических процедур.

Варианты ручек



LM-ErgoSense

Большой диаметр и улучшенный дизайн обеспечивают сенсационное удобство работы, доказанное клиническими тестами. Ручка может быть оснащена уникальным интеллектуальным чипом RFID и совместима с системой учета Dental Tracking System, которая предлагает расширенные возможности по менеджменту клиники (больше информации на www.dentaltracking.com).



LM-ErgoMax

Классический эргономичный дизайн, который копируют конкуренты. Прекрасно подходит для проведения любых стоматологических процедур, гарантирует отличную тактильную чувствительность и прекрасно лежит в руке



LM-ErgoNorm

Более тонкая ручка, которая хорошо подходит для легких клинических процедур.

i Codes and diameters

LMErgoSense

ES = ручка ErgoSense
(Ø 13.7 мм)

LMErgoMax

XSI = ручка ErgoMax
(Ø 11.5 мм)

LMErgoNorm

SI = ручка ErgoNorm
(Ø 8.5 мм)

Специальные ручки



LM-ErgoMix

Ручка LM-ErgoMix для инструментов со сменными насадками.

Доступна для специальных инструментов.

См. стр. 32.



LM-ErgoAccess

Изогнутая ручка обеспечивает лучший доступ к труднодоступным областям.

Доступна для специальных инструментов.

См. стр. 29.



LM-ErgoSingle

Хорошо сбалансированная ручка для зеркала для лучшего доступа.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Ограниченная гарантия

Описанные ниже гарантийные условия распространяются на продукцию компании LM-Instruments OY (далее "Продукты"), продаваемые предприятиям или частным клиентам компанией LM-Instruments OY (далее "Производитель").

Настоящим Производитель предоставляет гарантию двадцать четыре (24) месяца от даты покупки Продуктов у Авторизованного дилера (далее "Дилер") на производственные дефекты и дефекты, связанные с материалом. Гарантийный срок три (3) месяца предоставляется на Продукты, срок службы которых меньше, чем двадцать четыре (24) месяца при стандартном использовании и износе. К таким продуктам относятся, например, насадки для ручных инструментов, насадки на ультразвуковые скейлеры, насадки для эндодонтических файлов, зеркала, шлифовальные камни для машинки для заточки.

Данные гарантийные условия не распространяются на Продукты или их части, если:

- имело место неправильное обращение, халатное использование или подключение к ненадлежащим источникам питания;
- были внесены изменения или дополнения без письменного согласия Производителя;
- Продукты использовались с нарушением пользовательских инструкций по установке, использованию и уходу за Продуктами;
- Продукты были изношены в ходе нормального применения, например, насадки для LM-MultiHolder, штрипсы для LM-Cello.

Рассмотрение и применение гарантийных случаев направлено исключительно на исправление ошибок и/или замену дефектных Продуктов, произведенных Производителем. Обязательными условиями сохранения гарантии являются наличие письменного заявления на имя производителя в гарантийный период, возврат дефектного продукта Производителю от Дилера, а также официальное заключение Производителя о наличии данного дефекта.

В случае необходимости замены или ремонта Продуктов по гарантии, Покупатель должен связаться с Дилером, у которого данные Продукты были приобретены, отправить Дилеру письменное заявление и Продукты, требующие проверки на соответствие гарантийному случаю.

Условия гарантии не распространяются на Продукты, ремонт которых производился лицами не авторизованными Производителем.

Гарантийные обязательства, описанные выше, являются единственными, которые принимает на себя Производитель в отношении Продуктов. Производитель не берет на себя какие-либо другие гарантийные обязательства. Производитель не несет ответственности за любые косвенные или случайные убытки, потерянную выгоду и любые потери, связанные с продажей, поставкой, монтажом или ремонтом Продуктов.

Производитель не несет ответственности перед Дилером, Покупателем или любым другим лицом за потерю, поломку, а также любые другие повреждения, возникшие в результате использования, обработки или ремонта лицами, не авторизованными Производителем.

LMErgoMix

EM = ручка ErgoMix
(Ø 12.5 мм)

LMErgoAccess

EASI = ручка ErgoAccess
(Ø 11.5 мм, изогнутая)

LMErgoSingle


ESI = ручка ErgoSingle
(Ø 11.5 мм)

РУЧКИ ДЛЯ ЗЕРКАЛ

Резьба ручек для зеркал LM соответствует международному стандарту M2.5, поэтому хвостовик стоматологического зеркала должен иметь диаметр 2,5-2,6 мм.

Зеркала продаются отдельно (зеркало #4).

Артикул: 10P (1 шт.) и 10P12 (упаковка, 12 шт.)

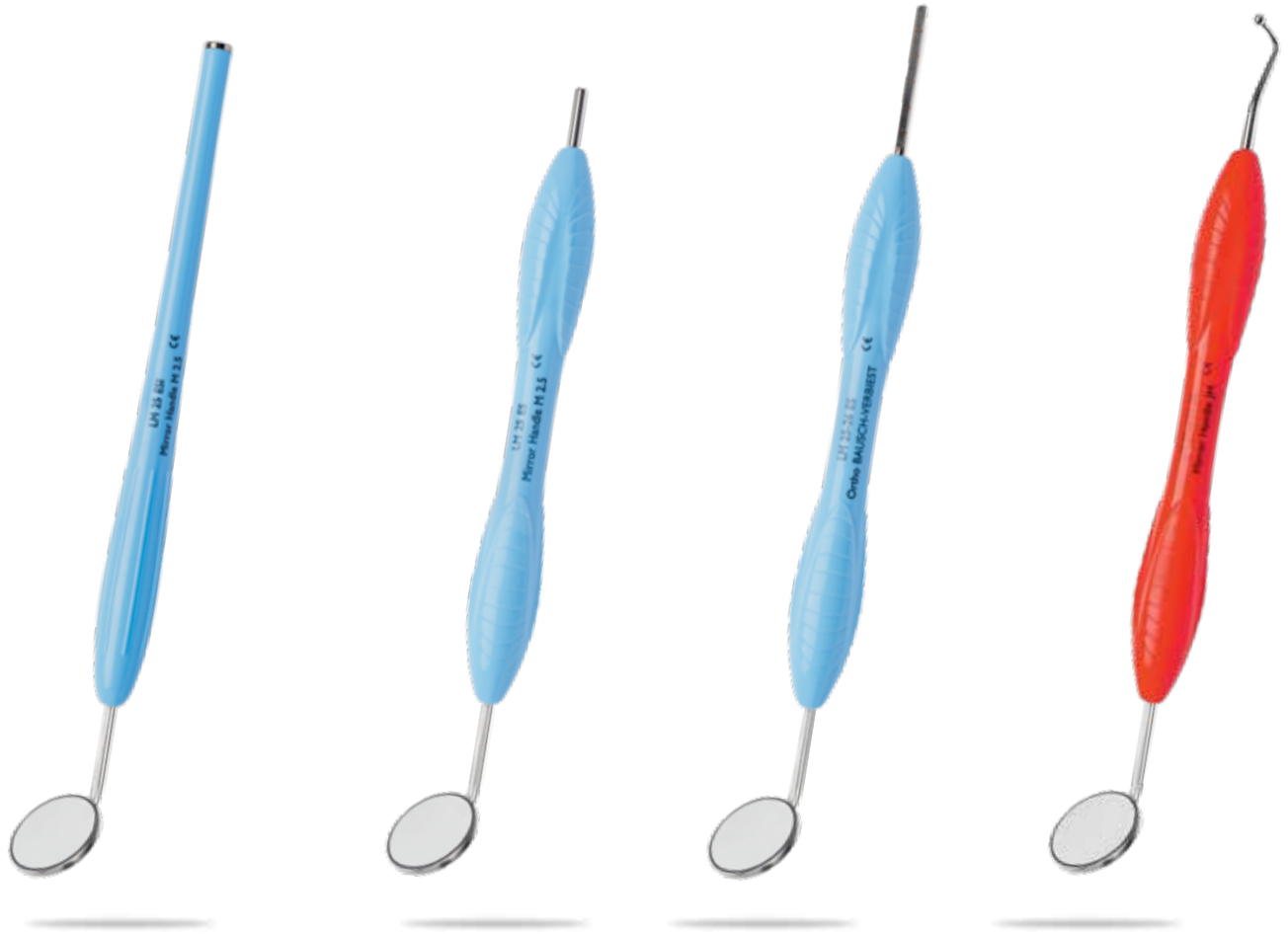

Варианты ручек:

- LMergoSense**
- LMergoMax**
- LMergoNorm**

Ручка для зеркала ErgoSingle

LMergoSingle LM 25 ESI

- Хорошо сбалансирована, обеспечивает лучший доступ
- Цвета: красный, серый, голубой

Ручка для зеркала 25

- LMergoSense** LM 25 ES
- LMergoMax** LM 25 XSI
- LMergoNorm** LM 25 SI

- Односторонняя
- Простой дизайн
- Цвета: красный, серый, голубой

Ручка для зеркала, ортодонтическая

- LMergoSense** LM 25-26 ES
- LMergoMax** LM 25-26 XSI

- Для измерения вертикального перекрытия и сагитальной щели
- Миллиметровая шкала, длина 25 мм

Ручка для зеркала JM

- LMergoSense** LM 25-473 ES
- LMergoMax** LM 25-473 XSI

- Для имплантатов

ЗОНДЫ

Предназначены для обследования кариозных полостей, краевого прилегания пломб и зон реставрации.

■ Большинство стоматологических и пародонтальных зондов выпускаются в односторонней модификации.



Зонд 5-8

- LMErgoSense LM 5-8 ES
- LMErgoMax LM 5-8 XSI
- LMErgoNorm LM 5-8 SI



Зонд 5-9

- LMErgoSense LM 5-9 ES
- LMErgoMax LM 5-9 XSI
- LMErgoNorm LM 5-9 SI



Идеально подходит для обследования дистальных поверхностей моляров.

Зонд 9-17C, отцентрованный

- LMErgoSense LM 9-17C ES
- LMErgoMax LM 9-17C XSI
- LMErgoNorm LM 9-17C SI

- Отцентрованный (17C)
- Удлиненное тело и рабочая часть "обратного действия"



Зонд 17-23

- LMErgoSense LM 17-23 ES
- LMErgoMax LM 17-23 XSI
- LMErgoNorm LM 17-23 SI

- Для обследования дистальных поверхностей



Предназначен для обследования дистальных поверхностей.

Зонд 17C-23, отцентрованный

- LMErgoSense LM 17C-23 ES
- LMErgoMax LM 17C-23 XSI
- LMErgoNorm LM 17C-23 SI

- Отцентрованный (17C)
- Для обследования дистальных поверхностей



Зонд 3-6

- LMErgoSense LM 3-6 ES
- LMErgoMax LM 3-6 XSI
- LMErgoNorm LM 3-6 SI



Для обследования поддесневой поверхности зуба..

Зонд 11-12

- LMErgoSense LM 11-12 ES
- LMErgoMax LM 11-12 XSI
- LMErgoNorm LM 11-12 SI

- Углы аналогичны кюрете Грейси 11/12



Варианты ручек:



LM ErgoSense



LM ErgoMax



LM ErgoNorm

Зонд 11F-12F, гибкий

- LM ErgoSense** LM 11F-12F ES
- LM ErgoMax** LM 11F-12F XSI

- Гибкие рабочие части по углам наклона аналогичны кюрете Грейси 11/12
- Для диагностики поддесневых отложений и определения глубины пародонтальных карманов

Зонд 18-19

- LM ErgoSense** LM 18-19 ES
- LM ErgoMax** LM 18-19 XSI
- LM ErgoNorm** LM 18-19 SI

- Для обследования искусственных коронок, мостовидных протезов и вкладок
- Высокая чувствительность к линиям швов

Зонд 29

- LM ErgoSense** LM 29 ES
- LM ErgoMax** LM 29 XSI
- LM ErgoNorm** LM 29 SI

- Дизайн Holst
- Боковой изгиб на теле зонда
- Односторонний

Зонд 9


- LM ErgoSense** LM 9 ES
- LM ErgoMax** LM 9 XSI
- LM ErgoNorm** LM 9 SI

- Односторонний

ПЕРИОДОНТАЛЬНЫЕ ЗОНДЫ

Для проверки наличия и определения глубины пародонтальных карманов.

■ Большинство стоматологических и пародонтальных зондов выпускаются в односторонней модификации.

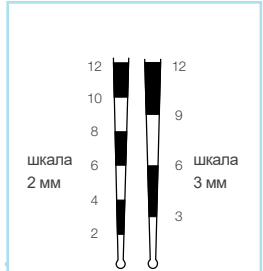

Окончание - шарик
Диаметр \varnothing 0,5 мм

- Повышенная тактильная чувствительность
- Нет риска повреждения тканей или прокола пародонтального кармана
- Обеспечивают более точное измерение глубины пародонтального кармана
- Дают информацию о поддесневых камнях и других неровностях корня

Периодонтальный зонд 23-52B

- LM**ErgoSense LM 23-52B ES
- LM**ErgoMax LM 23-52B XSI
- LM**ErgoNorm LM 23-52B SI

Периодонтальный зонд 8-520B

- LM**ErgoSense LM 8-520B ES
- LM**ErgoMax LM 8-520B XSI
- LM**ErgoNorm LM 8-520B SI

Периодонтальный зонд 23-520B

- LM**ErgoSense LM 23-520B ES
- LM**ErgoMax LM 23-520B XSI
- LM**ErgoNorm LM 23-520B SI

Периодонтальный зонд 23-530B

- LM**ErgoSense LM 23-530B ES
- LM**ErgoMax LM 23-530B XSI
- LM**ErgoNorm LM 23-530B SI



Шкала
1-2-3-5-7-8-9-10

Зонд со шкалой
Williams 51

- LMErgoSense** LM 51 ES
- LMErgoMax** LM 51 XSI
- LMErgoNorm** LM 51 SI

- Односторонний



Зонд со шкалой WHO
8-550B

- LMErgoSense** LM 8-550B ES
- LMErgoMax** LM 8-550B XSI
- LMErgoNorm** LM 8-550B SI



Зонд со шкалой WHO
23-550B


- LMErgoSense** LM 23-550B ES
- LMErgoMax** LM 23-550B XSI
- LMErgoNorm** LM 23-550B SI



Зонд со шкалой WHO
550B

- LMErgoSense** LM 550B ES
- LMErgoMax** LM 550B XSI
- LMErgoNorm** LM 550B SI

- Односторонний

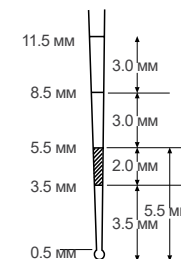

Шкала WHO была разработана для определения индекса CRITN.

Диагноз:

0 = нет признаков заболевания

1 = кровоточивость десны после зондирования

2 = наличие над- и/или поддесневого камня

3 = клинический карман глубиной 4-5 мм

4 = клинический карман глубиной 6 мм и более

Варианты ручек:



LMErgoSense



LMErgoMax



LMErgoNorm



Зонд Северная
Каролина 54B

LMErgoSense LM 54B ES

LMErgoMax LM 54B XSI

- Односторонний



Зонд Marquis 12 53B

LMErgoSense LM 53B ES

LMErgoMax LM 53B XSI

- Односторонний
- Аналогичен зонду 530B, но без шарика на конце рабочей части

ЗОНДЫ ДЛЯ ФУРКАЦИИ

Для определения глубины и степени поражения зоны фуркации корней.



■ Обследование поражений под разными углами как на верхней, так и на нижней челюсти.



Зонд для зоны
фуркации Nabers

LMErgoSense LM 20-21 ES

LMErgoMax LM 20-21 XSI

LMErgoNorm LM 20-21 SI



шкала 2 мм,
окончание - шарик



Зонд для зоны фуркации

LMErgoSense LM 20B-21B ES

LMErgoMax LM 20B-21B XSI

LMErgoNorm LM 20B-21B SI

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ



Набор диагностический LM-DiagnoSet

LMErgoSense LM 6651 ES

LMErgoMax LM 6651 XSI

В состав входит:
Кассета LM-Servo 5 (LM 6650), Ручка для зеркала и зеркало (LM 25 и LM 10P), Зонд (LM 5-8), Зонд периодонтальный WHO (LM 550B), Экскаватор круглый 1.5 мм (LM 63-64), Пинцет (LM 10A)

LMErgoSense
SHARP DIAMOND

Противоположности притягиваются. Это справедливо для качественных пародонтологических инструментов. В идеале они должны быть острые, как бритва, очень жесткие, но при этом гладкие и легкие. Новое микро-мембранное покрытие, нанесенное с помощью самых современных технологий (Physical Vapor Deposition (PVD)) позволило LM создать инструменты Sharp Diamond - инструменты с оптимальной комбинацией всех перечисленных качеств. Инструменты Sharp Diamonds не нужно затачивать, они жесткие, но легкие и изысканные. Sharp Diamond сочетают уникальные преимущества для вас и ваших пациентов.

- Не нужно затачивать
- Долго остаются максимально острыми
- Экономия времени и денег
- Высший рейтинг в оценке эргономики инструмента*
- Улучшенная эффективность работы и клинические результаты
- Полный контроль
- “Срезание” зубных отложений, а не скалывание или отламывание

“Я действительно чувствую разницу, работая постоянно острым инструментом!”


Анна, сертифицированный гигиенист стоматологический, США

“Должен заметить, что сначала просто не поверил, что инструмент может быть таким острым и, при этом, не нуждаться в заточке. Я ошибался! А ручка LM-ErgoSense дополнительно улучшает точность и эргономичность работы. Это просто потрясающие инструменты для пародонтологии.”

Лаури, пародонтолог, Финляндия



Прочность продлевает срок службы инструмента. Инструменты Sharp Diamond получили характеристику прочности 63 по шкале Роквелла (Rockwell scale).

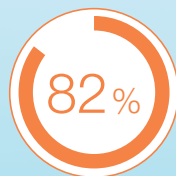

Уменьшение износа по сравнению со стандартными материалами ручных инструментов **

Ссылки на исследования: * (1) Sormunen E., Nevala N.: Evaluation of ergonomics and usability of dental scaling instruments; Dental scaling simulation and field study, part III. Finnish Institute of Occupational Health, LM-Instruments Oy. (2) Nevala N., Sormunen E., Remes J., Suomalainen K.: Ergonomic and productivity evaluation of scaling instruments in dentistry. The Ergonomics Open Journal 2013; 6, 6-12. ** Leppäniemi J. et al.: The influence of PVD coatings on the wear performance of steel dental currettes. Key Engineering Materials Vol. 674 (2016), 289-295.

www.lm-dental.com/sharpdiamond



ЗАТОЧКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ!




ВСЕГДА ОСТРЫЕ

МИКРО ПОКРЫТИЕ НЕ ТРЕБУЮЩЕЕ ЗАТОЧКИ

Вы почувствуете лучший контроль и эффективность, просто «сбрасывая» зубные отложения, а не откалывая их.

Экономия времени и денег

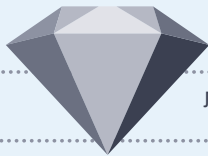

Очень долго остаются острыми

Улучшенная эргономика ручки

Лучшие клинические результаты

ХАРАКТЕРИСТИКИ SHARP DIAMOND



Не требуется заточка.....	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Превосходная острота.....	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Улучшенная эргономика.....	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Минимум обслуживания.....	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ПРОЧНОСТЬ

Прочность продлевает срок службы инструмента. Инструменты Sharp Diamond получили характеристику прочности 63 по шкале Роквелла (Rockwell scale).



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**

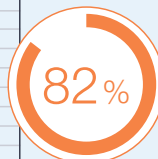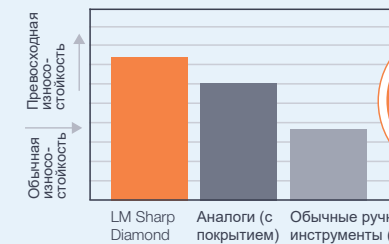

Уменьшение износа по сравнению со стандартными материалами ручных инструментов

Ссылки на исследования: * (1) Sormunen E., Nevala N: Evaluation of ergonomics and usability of dental scaling instruments; Dental scaling simulation and Field study, part III. Finnish Institute of Occupational Health, LM-Instruments Oy. (2) Nevala N, Sormunen E, Remes J, Suomalainen K: Ergonomic and productivity evaluation of scaling instruments in dentistry. The Ergonomics Open Journal 2013; 6, 6-12. ** Leppänen J. et al: The influence of PVD coatings on the wear performance of steel dental currettes. Key Engineering Materials Vol. 674 (2016), 289-295.



Скейлер серповидный, мини SD

LMErgoSense LM 311-312SD ES

- Покрытие Sharp Diamond - заточка не требуется
- Тонкое деликатно изогнутое лезвие
- Для всех поверхностей



Скейлер серповидный, микро SD

LMErgoSense LM 301-302SD ES

- Покрытие Sharp Diamond - заточка не требуется
- Тонкая рабочая часть
- Удлиненное плечо



Кюрета Mini Gracey 1/2 SD

LMErgoSense LM 201-202MSD ES

- Покрытие Sharp Diamond - заточка не требуется
- Для резцов и премоляров



Кюрета Syntette мини SD

LMErgoSense LM 215-216MSD ES

- Покрытие Sharp Diamond - заточка не требуется
- Лучший доступ к узким и глубоким карманам
- Особенно подходит для небных и лингвальных поверхностей премоляров и резцов

LMErgoSense LM 207-208MSD ES

- Покрытие Sharp Diamond - заточка не требуется
- Для премоляров и моляров
- Для щечных, мезиальных и лингвальных поверхностей резцов

НОВОЕ ПОКРЫТИЕ! ЗАТОЧКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ!



Кюрета Mini Gracey 11/12 SD

LMErgoSense LM 211-212MSD ES


- Покрытие Sharp Diamond - заточка не требуется
- Для мезиальных поверхностей премоляров и моляров



Кюрета Mini Gracey 15/16 SD

LMErgoSense LM 245-246MSD ES

- Покрытие Sharp Diamond - заточка не требуется
- Для мезиальных поверхностей моляров
- Лезвие более изогнуто, чем у кюреты Gracey 11/12 Мини, для улучшенного доступа

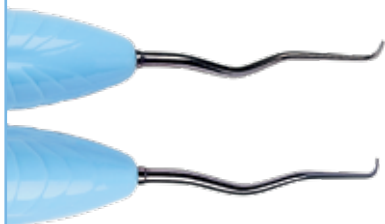

Кюрета Mini Gracey 13/14 SD

LMErgoSense LM 213-214MSD ES

- Покрытие Sharp Diamond - заточка не требуется
- Для дистальных поверхностей премоляров и моляров




Кюрета Mini Gracey 17/18 SD

LMErgoSense LM 247-248MSD ES

- Покрытие Sharp Diamond - заточка не требуется
- Для дистальных поверхностей моляров
- Лезвие более изогнуто, чем у кюреты Gracey 13/14 Мини, для улучшенного доступа

”LM-ErgoSense
– Исключительное
удобство работы

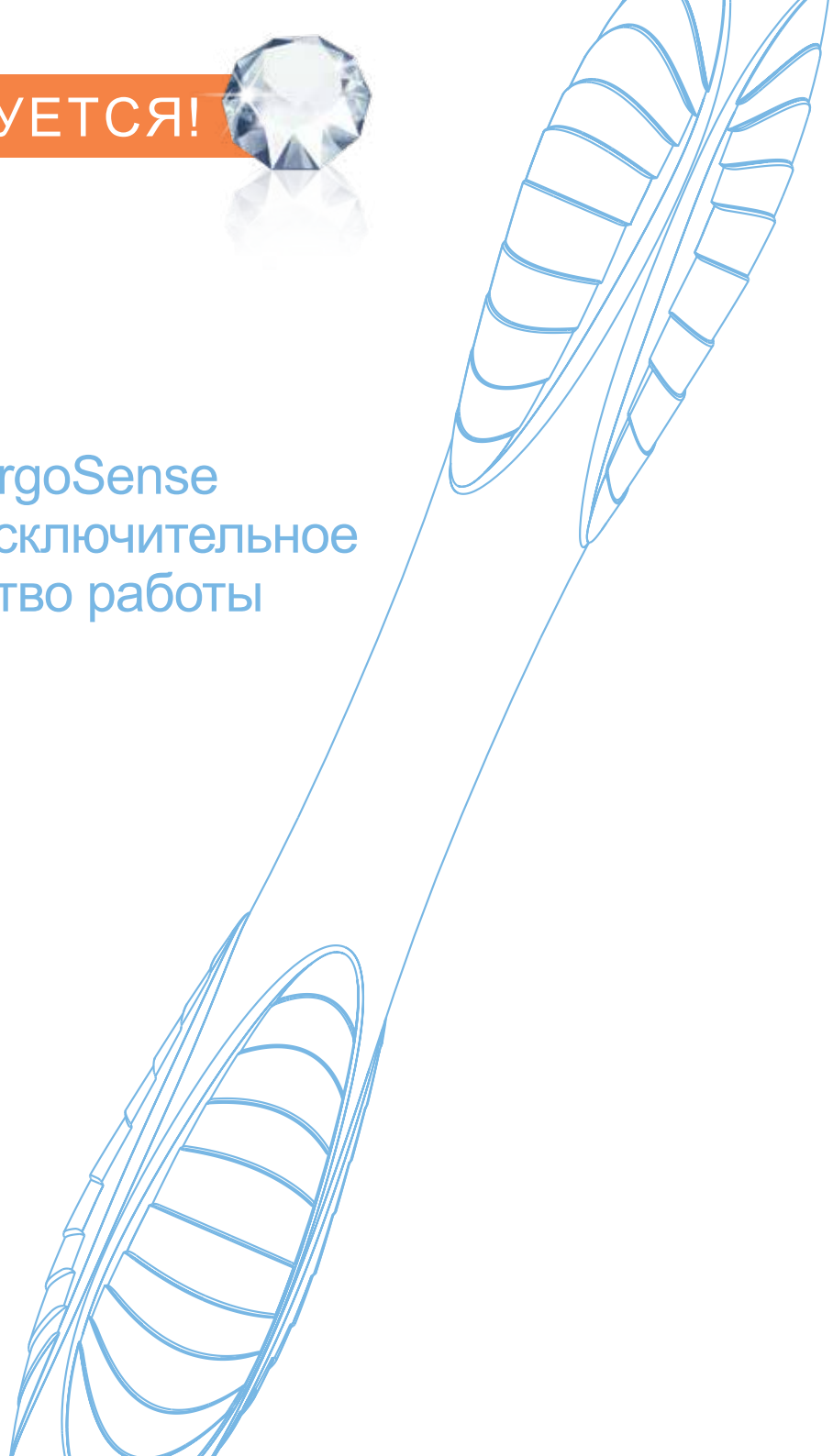

СКЕЙЛЕРЫ

Для удаления наддесневых отложений

Применение:

Для удаления отложений поместите верхнюю треть режущей грани скейлера на зуб. Наклоните инструмент так, чтобы угол между зубом и лезвием составлял от 70° до 80°. Примените латеральное давление и активируйте скейлер, используя вертикальные, диагональные или горизонтальные штрихообразные движения. Для сохранения контроля используйте короткие штрихообразные движения длиной 2-3 мм.



Описание:

- Треугольное поперечное сечение
- Лицевая поверхность перпендикулярна телу инструмента
- Две режущих грани (показаны красной линией)
- Заостренный кончик

Варианты ручек:



LM ErgoSense



LM ErgoMax



LM ErgoNorm



Заточка



Для удаления неглубоко расположенных над- и поддесневых отложений. Подходит для обработки плотно прилегающих друг к другу поверхностей соседних зубов.

Скейлер серповидный, микро

- LM ErgoSense LM 301-302 ES
- LM ErgoMax LM 301-302 XSI
- LM ErgoNorm LM 301-302 SI

- Дизайн 204SD
- Тонкая рабочая часть
- Удлиненное плечо



Применение



Скейлер серповидный LM204S

- LM ErgoSense LM 303-304 ES
- LM ErgoMax LM 303-304 XSI
- LM ErgoNorm LM 303-304 SI

- Резко изогнутое тело инструмента и очень тонкая рабочая часть

Особенно удобен для обработки интерпроксимальных поверхностей.



Скейлер серповидный, мини

- LM ErgoSense LM 311-312 ES
- LM ErgoMax LM 311-312 XSI
- LM ErgoNorm LM 311-312 SI

- Тонкое деликатно изогнутое лезвие
- Для всех поверхностей



Скейлер серповидный LM23

- LM ErgoSense LM 313-314 ES
- LM ErgoMax LM 313-314 XSI
- LM ErgoNorm LM 313-314 SI

- Более короткое лезвие и длинное тело по сравнению с LM 311-312



Применение



Скейлер серповидный Srape-Kaplan

- LMErgoSense** LM 322-323 ES
- LMErgoMax** LM 322-323 XSI
- LMErgoNorm** LM 322-323 SI

- Особо прочная, жесткая, сильно изогнутая рабочая часть
- Для массивных зубных отложений



Скейлер серповидный Mini Kaplan

- LMErgoSense** LM 333-334 ES
- LMErgoMax** LM 333-334 XSI
- LMErgoNorm** LM 333-334 SI

- Такие же углы изгиба, но более тонкая рабочая часть, чем у инструмента LM 322-323



Скейлер серповидный McCall 11A-12A

- LMErgoSense** LM 324-325 ES
- LMErgoMax** LM 324-325 XSI
- LMErgoNorm** LM 324-325 SI



Скейлер серповидный, гигиенический

- LMErgoSense** LM 141 ES
- LMErgoMax** LM 141 XSI
- LMErgoNorm** LM 141 SI


- Односторонний



Скейлер гигиенический U15 Towner

- LMErgoSense** LM 150 ES
- LMErgoMax** LM 150 XSI
- LMErgoNorm** LM 150 SI

- Односторонний

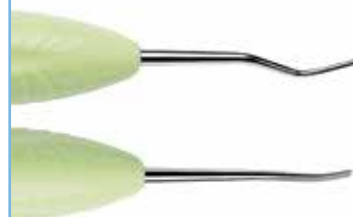

Скейлер - долото H4-H5

- LMErgoSense** LM 144-145 ES
- LMErgoMax** LM 144-145 XSI
- LMErgoNorm** LM 144-145 SI

- Прямая долотообразная рабочая часть - для обработки межзубных промежутков
- Угол рабочей поверхности 90°



Скейлер гигиенический H6-H7

- LMErgoSense** LM 146-147 ES
- LMErgoMax** LM 146-147 XSI
- LMErgoNorm** LM 146-147 SI



Скейлер Laplander

- LMErgoSense** LM 148-149 ES
- LMErgoMax** LM 148-149 XSI

- Аналогичен H6-H7, но имеет боковой изгиб
- Легкий доступ к молярам и проксимальным поверхностям



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЮРЕТЫ

Предназначены для удаления средних и массивных над- и поддесневых отложений.

Применение:

Для удаления отложений разместите одну из режущих граней на поверхности зуба. Наклоните инструмент так, чтобы угол между зубом и лезвием составлял от 70° до 80°. Примените латеральное давление и активируйте кюрету, используя вертикальные, диагональные или горизонтальные штрихообразные движения. Обе режущие грани могут использоваться просто наклоняя инструмент в одну или в другую сторону.



Описание:

- Рабочая часть перпендикулярна телу инструмента
- Два режущих края (показаны красной линией)
- Закругленный кончик

Варианты ручек:



LMergoSense



LMergoMax



LMergoNorm



Заточка

McCALL



Усиленное лезвие и более жесткое плечо.

Кюрета McCall 13S-14S


- LMergoSense LM 222-223 ES
- LMergoMax LM 222-223 XSI
- LMergoNorm LM 222-223 SI

- Для работы на резцах и премолярах



Кюрета Mini McCall 13S-14S

- LMergoSense LM 222-223M ES
- LMergoMax LM 222-223M XSI
- LMergoNorm LM 222-223M SI

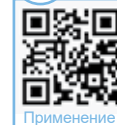

Применение

- Для глубоких узких карманов
- Более острая, чем стандартная модель
- Слегка закругленный кончик (не серповидный)



Кюрета LM 15-16

- LMergoSense LM 225-226 ES
- LMergoMax LM 225-226 XSI
- LMergoNorm LM 225-226 SI



Кюрета McCall 17-18

- LMergoSense LM 277-278 ES
- LMergoMax LM 277-278 XSI
- LMergoNorm LM 277-278 SI

- Особенно хорошо подходит для широких поверхностей моляров
- Для удаления значительных зубных отложений



Кюрета McCall 17S-18S

- LMergoSense LM 279-280 ES
- LMergoMax LM 279-280 XSI
- LMergoNorm LM 279-280 SI

- Отлично подходит для работы в плотных межзубных промежутках

LANGER

Кюреты Langer сочетают рабочую часть универсальной кюреты и изгиб тела кюреты Грейси. Углы наклона облегчают доступ к труднодоступным поверхностям. Мезиальная и дистальная поверхности могут быть обработаны одним инструментом.



Кюрета Langer 1/2

- LMErgoSense LM 281-282 ES
- LMErgoMax LM 281-282 XSI
- LMErgoNorm LM 281-282 SI

- Для работы на премолярах и молярах нижней челюсти



Кюрета Langer 3/4

- LMErgoSense LM 283-284 ES
- LMErgoMax LM 283-284 XSI
- LMErgoNorm LM 283-284 SI

- Для работы на премолярах и молярах верхней челюсти




Кюрета Langer 5/6

- LMErgoSense LM 285-286 ES
- LMErgoMax LM 285-286 XSI
- LMErgoNorm LM 285-286 SI

- Для работы на резцах верхней и нижней челюсти

MINI LANGER


Кюреты Langer мини имеют удлиненное тело инструмента и укороченную рабочую часть, по сравнению со стандартной моделью. Удобны для работы в плотных межзубных промежутках. Обеспечивают лучший доступ к узким глубоким карманам и области фуркации.

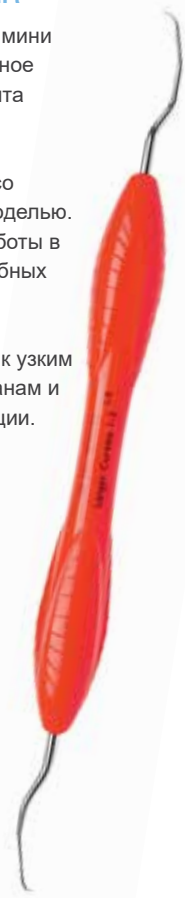

Кюрета Langer 1/2, мини

- LMErgoSense LM 281-282M ES
- LMErgoMax LM 281-282M XSI
- LMErgoNorm LM 281-282M SI


- Для работы на премолярах и молярах нижней челюсти

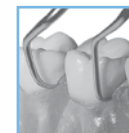

Кюрета Langer 3/4, мини

- LMErgoSense LM 283-284M ES
- LMErgoMax LM 283-284M XSI
- LMErgoNorm LM 283-284M SI

- Для работы на премолярах и молярах верхней челюсти

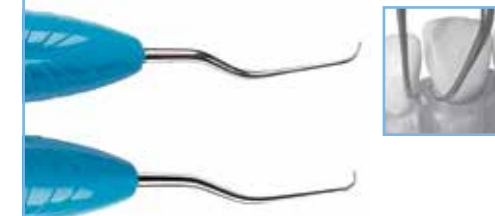

Кюрета Langer 5/6, мини

- LMErgoSense LM 285-286M ES
- LMErgoMax LM 285-286M XSI
- LMErgoNorm LM 285-286M SI

- Для работы на резцах верхней и нижней челюсти

GOLDMAN FOX



Кюрета Goldman-Fox 3

LMErgoSense LM 233-234 ES

LMErgoMax LM 233-234 XSI

LMErgoNorm LM 233-234 SI

- Для премоляров и моляров



Кюрета Goldman-Fox 4

LMErgoSense LM 235-236 ES

LMErgoMax LM 235-236 XSI

LMErgoNorm LM 235-236 SI

- Для моляров

COLUMBIA



Кюрета Columbia 2L-2R

LMErgoSense LM 217-218 ES

LMErgoMax LM 217-218 XSI

LMErgoNorm LM 217-218 SI

- Для резцов и премоляров



Кюрета Columbia 4L-4R

LMErgoSense LM 219-220 ES

LMErgoMax LM 219-220 XSI

LMErgoNorm LM 219-220 SI

- Для резцов, клыков и премоляров



Кюрета Columbia 13-14

LMErgoSense LM 237-238 ES

LMErgoMax LM 237-238 XSI

LMErgoNorm LM 237-238 SI

- Для моляров

BARNHART



Кюрета Barnhart 5-6

LMErgoSense LM 227-228 ES

LMErgoMax LM 227-228 XSI

- Для моляров



ИНСТРУМЕНТЫ С АЛМАЗНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

Инструменты с алмазным напылением разработаны для обработки глубоко расположенных вогнутых поверхностей корня в анатомически труднодоступных областях.

Могут использоваться для работы в различных направлениях.



Кюрета Concavity Diamond File SV 5-6

LMErgoSense LM 255-256D ES

LMErgoMax LM 255-256D XSI

LMErgoNorm LM 255-256D SI

- Закругленная и изогнутая рабочая часть с алмазным покрытием
- Для обработки значительных поражений в зоне фуркации



Кюрета Furcation Diamond File SV 7-8

LMErgoSense LM 257-258D ES


LMErgoMax LM 257-258D XSI

LMErgoNorm LM 257-258D SI

- Яйцевидная рабочая часть с алмазным покрытием
- Для обработки глубоких фуркаций



Применение

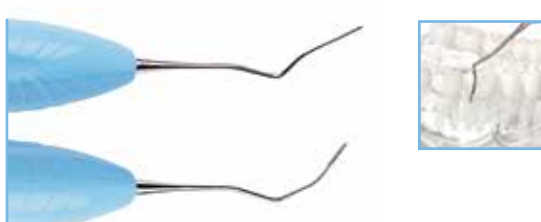


Кюрета Diamond File mes-dist

LMErgoSense LM 263-264D ES

LMErgoMax LM 263-264D XSI

- Очень деликатный инструмент для финишного скейлинга поверхностей корня
- Тонкая и гибкая рабочая часть обеспечивает легкий доступ к мезиально-дистальным поверхностям и углублениям

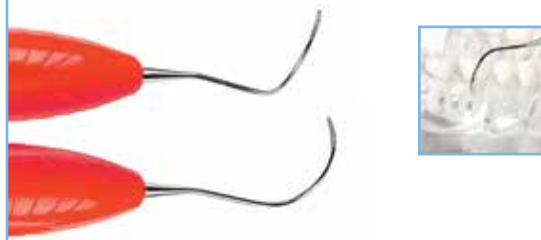

Кюрета Furcation Diamond File

LMErgoSense LM 261-262D ES

LMErgoMax LM 261-262D XSI

- Очень деликатный инструмент для удаления твердых зубных отложений в зоне фуркации
- Легкий доступ к поверхностям благодаря тонкой и гибкой рабочей части

LM-SYNTETTE

РАЗРАБОТАНО LM

Комбинация универсальной и финишной кюреты для удаления над- и поддесневых отложений. Подходит для работы как на вогнутых, так и на выпуклых поверхностях. Дистальные и мезиальные поверхности одного межзубного пространства могут быть обработаны одним инструментом. Подходит для работы как вертикальной, так и горизонтальной техникой.



Описание

- Рабочая часть разделена на две расположенные под углом плоскости
- Закругленный кончик



Применение

LM-Syntette - история создания



История LM Syntette

Варианты ручек:




LMErgoSense



LMErgoMax



LMErgoNorm

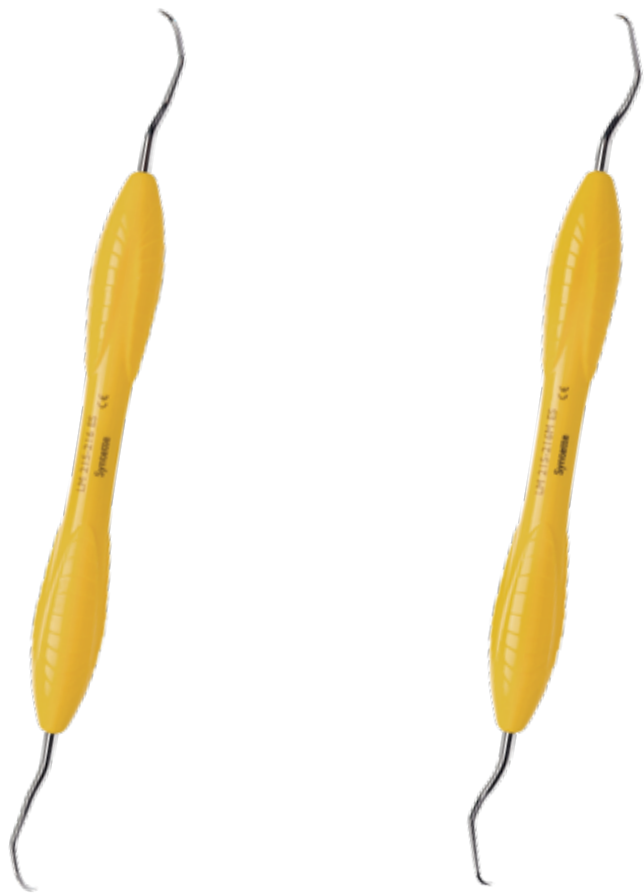

Кюрета LM-Syntette

- LMErgoSense** LM 215-216 ES
- LMErgoMax** LM 215-216 XSI
- LMErgoNorm** LM 215-216 SI

- LM Dual-Gracey

Кюрета Syntette мини

- LMErgoSense** LM 215-216M ES
- LMErgoMax** LM 215-216M XSI
- LMErgoNorm** LM 215-216M SI

- Лучший доступ к узким и глубоким карманам
 - Особенно подходит для небных и лингвальных поверхностей премоляров и резцов.

СКЕЙЛЕРЫ - МОТЫГИ

Для удаления над- и поддесневых зубных отложений.

Подходят для работы в глубоких узких карманах и на вогнутых поверхностях корня. Для работы как вертикальной, так и горизонтальной техникой.



Описание:

- Тонкая рабочая часть в форме мотыги с закругленными углами
- Эллиптический режущий край



Скейлер - мотыга для фронтальной группы

- LMErgoSense** LM 112-113 ES
- LMErgoMax** LM 112-113 XSI
- LMErgoNorm** LM 112-113 SI

- Для губных и лингвальных поверхностей фронтальной группы
 - Подходит для обработки нижних резцов, наклоненных внутрь



Скейлер-мотыга латеральный

- LMErgoSense** LM 134-135 ES
- LMErgoMax** LM 134-135 XSI
- LMErgoNorm** LM 134-135 SI

- Для щечных и лингвальных поверхностей всех зубов
 - Может использоваться для фуркаций



Скейлер-мотыга для моляров


- LMErgoSense** LM 156-157 ES
- LMErgoMax** LM 156-157 XSI
- LMErgoNorm** LM 156-157 SI

- Для мезиальных и дистальных поверхностей моляров
 - Может использоваться для фуркаций



ИНСТРУМЕНТЫ LM-ERGOACCESS

Решение для удаления зубных отложений из труднодоступных областей. Изогнутая ручка удобна в использовании и делает возможным доступ к труднодоступным областям лечения. Больше не будет трудностей с обработкой области моляров или лингвально наклоненными резцами.

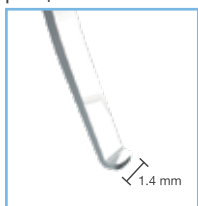

Скейлер H-Scaler I,
Скейлер H-Scaler II:

Тонкое мотыгообразное лезвие с закругленным режущим краем.



Скейлер H-Scaler I

LMErgoAccess

LM 112-156 EASI

- Изогнутая ручка облегчает доступ к труднодоступным областям, таким как, например, дистальные поверхности моляров




Скейлер - мотыга
H-Scaler II

LMErgoAccess

LM 156-157 EASI

- Обеспечивает легкий доступ к области моляров даже при слабом открытии челюсти

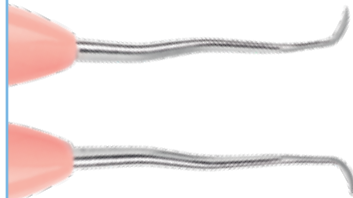

Скейлер серповидный
Micro Sickle EASI

LMErgoAccess

LM 301-302 EASI

- Подходит для работы на апроксимальных поверхностях фронтальной группы зубов

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФУРКАЦИИ

Хорошо подходит для обработки зоны фуркации многокорневых зубов.



Фуркатор KS


LMErgoSense

LM 259-260 ES

LMErgoMax

LM 259-260 XSI

- Деликатный, изогнутый экскаватор
- Подходит также для очистки узких апроксимальных канавок резцов и премоляров
- Для очистки зоны бифуркации и особенно внутренних, в том числе вогнутых, поверхностей

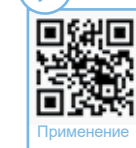

Применение

РУЧКА ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ LM-ERGOHOLD 3



Ручка для скальпеля LM-ErgoHold 3

LMErgoHold

LM 9003

- Отличное сцепление благодаря эластичному силикону
- Точный контроль лезвия
- Контролируемое вращение
- Контролируемое движение при разрезе ткани
- Подходит для всех лезвий No. 3 (лезвия 10, 10A, 11, 11K, 11P, 12, 12D, 15, 15C и 15S))

ФИНИШНЫЕ КЮРЕТЫ GRACEY

Зоноспецифические кюреты для удаления глубоко расположенных зубных отложений. Служат для финишной обработки и полировки поверхностей корня.

Использование:

Расположите треть или половину режущего края кюреты Gracey на поверхности зуба. (Большой изогнутый наружу край - всегда режущий.) Убедитесь, что хвостовик расположен параллельно зубу. Для удаления зубного камня приложите умеренное усилие, а для полировки корня легкое латеральное давление. Активируйте действие кюреты, используя вертикальные, диагональные или горизонтальные движения..



Описание:

- Рабочая поверхность наклонена под углом 20° к хвостовику
- Один изогнутый режущий край (красная линия)
- Закругленный кончик

Варианты ручек:



LMergoSense



LMergoMax




LMergoNorm



Заточка

Области применения кюрет Gracey:

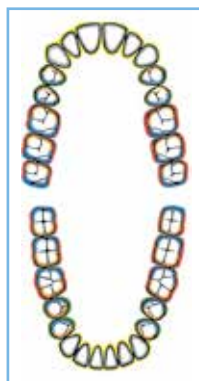

Резцы

- Все поверхности



Gracey 1/2



Gracey 5/6



Gracey 3/4

Премоляры и моляры

- Щечная - язычная



Gracey 7/8



Gracey 9/10

- Мезиальная



Gracey 11/12



Gracey 15/16

- Дистальная




Gracey 13/14



Gracey 17/18

КЮРЕТЫ GRACEY СТАНДАРТНЫЕ И МИНИ

Кюреты Gracey mini - удлиненный нижний сегмент рабочей части, сама рабочая часть меньше, чем у стандартной модели. Подходит для узких глубоких карманов.

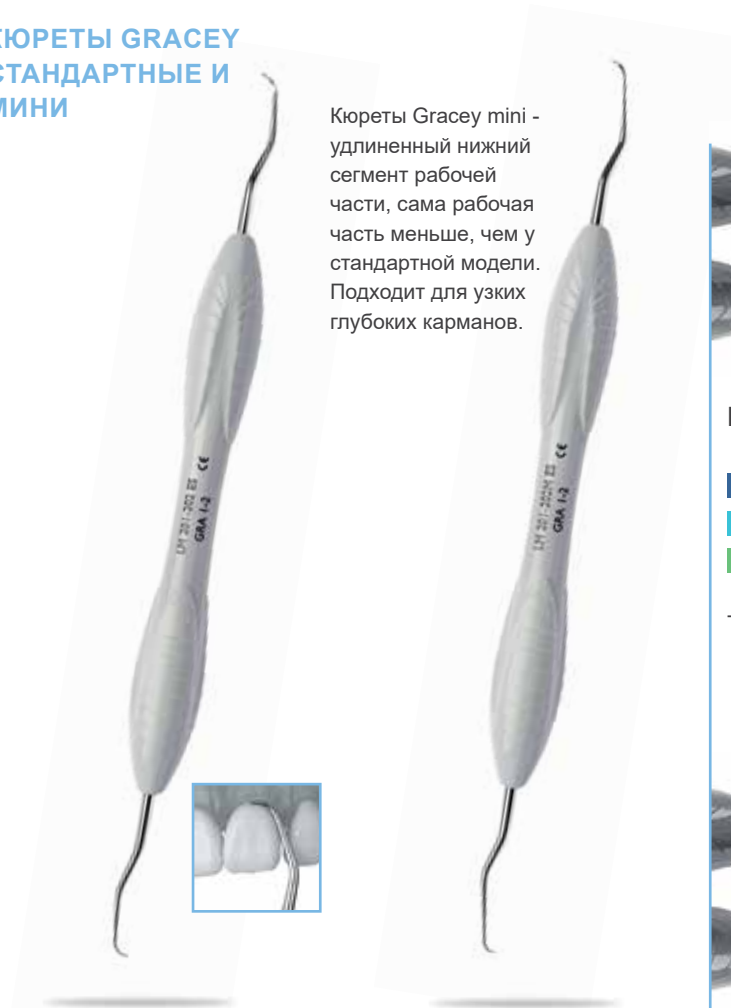

Кюрета Gracey 1/2

- LMergoSense LM 201-202 ES
- LMergoMax LM 201-202 XSI
- LMergoNorm LM 201-202 SI

- Для резцов и премоляров

Кюрета Gracey 1/2 Мини

- LMergoSense LM 201-202M ES
- LMergoMax LM 201-202M XSI
- LMergoNorm LM 201-202M SI

- Для резцов и премоляров



Кюрета Gracey 3/4

- LMergoSense LM 203-204 ES
- LMergoMax LM 203-204 XSI
- LMergoNorm LM 203-204 SI

- Для резцов и премоляров



Кюрета Gracey P3-P4

- LMergoSense LM 266-267 ES
- LMergoMax LM 266-267 XSI
- LMergoNorm LM 266-267 SI

- Укороченная рабочая часть делает инструмент более жестким



Кюрета Gracey 5/6

- LMErgoSense** LM 205-206 ES
- LMErgoMax** LM 205-206 XSI
- LMErgoNorm** LM 205-206 SI

- Для резцов и премоляров
- Особенно подходит для проксимальных поверхностей



Кюрета Gracey 9/10

- LMErgoSense** LM 209-210 ES
- LMErgoMax** LM 209-210 XSI
- LMErgoNorm** LM 209-210 SI

- Для щечных и лингвальных поверхностей моляров

ЛУЧШИЙ ВЫБОР



Кюрета Gracey 11/12

- LMErgoSense** LM 211-212 ES
- LMErgoMax** LM 211-212 XSI
- LMErgoNorm** LM 211-212 SI

- Для мезиальных поверхностей премоляров и моляров



Кюрета Gracey 11/12 Мини

- LMErgoSense** LM 211-212M ES
- LMErgoMax** LM 211-212M XSI
- LMErgoNorm** LM 211-212M SI

- Для мезиальных поверхностей моляров и премоляров



Кюрета Gracey 7/8

- LMErgoSense** LM 207-208 ES
- LMErgoMax** LM 207-208 XSI
- LMErgoNorm** LM 207-208 SI

- Для премоляров и моляров
- Для щечных, мезиальных и лингвальных поверхностей



Кюрета Gracey 7/8 Мини

- LMErgoSense** LM 207-208M ES
- LMErgoMax** LM 207-208M XSI
- LMErgoNorm** LM 207-208M SI

- Для премоляров и моляров
- Для щечных, мезиальных и лингвальных поверхностей

ЛУЧШИЙ ВЫБОР



Кюрета Gracey 13/14

- LMErgoSense** LM 213-214 ES
- LMErgoMax** LM 213-214 XSI
- LMErgoNorm** LM 213-214 SI

- Для дистальных поверхностей моляров и премоляров



Кюрета Gracey 13/14 Мини

- LMErgoSense** LM 213-214M ES
- LMErgoMax** LM 213-214M XSI
- LMErgoNorm** LM 213-214M SI

- Для дистальных поверхностей премоляров и моляров



Кюрета Gracey 15/16

- LMErgoSense LM 245-246 ES
- LMErgoMax LM 245-246 XSI
- LMErgoNorm LM 245-246 SI

- Для мезиальных поверхностей моляров
- Лезвие более изогнуто, чем у кюреты Gracey 11/12, для улучшенного доступа



Кюрета Gracey 15/16 Мини

- LMErgoSense LM 245-246M ES
- LMErgoMax LM 245-246M XSI
- LMErgoNorm LM 245-246M SI

- Для мезиальных поверхностей моляров
- Лезвие более изогнуто, чем у кюреты Gracey 11/12 Мини, для улучшенного доступа



Кюрета Gracey 17/18

- LMErgoSense LM 247-248 ES
- LMErgoMax LM 247-248 XSI
- LMErgoNorm LM 247-248 SI

- Для дистальных поверхностей моляров
- Лезвие более изогнуто, чем у кюреты Gracey 13/14, для улучшенного доступа



Кюрета Gracey 17/18 Мини

- LMErgoSense LM 247-248M ES
- LMErgoMax LM 247-248M XSI
- LMErgoNorm LM 247-248M SI

- Для дистальных поверхностей моляров
- Лезвие более изогнуто, чем у кюреты Gracey 13/14 Мини, для улучшенного доступа

КЮРЕТЫ MACRO GRACEY

Комбинация удлиненного нижнего сегмента рабочей части модели мини с лезвием стандартной модели. Для работы в глубоких карманах (AF - более 5 мм).

Кюрета Gracey 5/6 Макро

- LMErgoSense LM 205-206AF ES
- LMErgoMax LM 205-206AF XSI
- LMErgoNorm LM 205-206AF SI

- Для резцов и премоляров
- Особенно подходит для работы на проксимальных поверхностях

Кюрета Gracey 7/8 Макро

- LMErgoSense LM 207-208AF ES
- LMErgoMax LM 207-208AF XSI
- LMErgoNorm LM 207-208AF SI

- Для премоляров и моляров
- Для щечных, мезиальных и лингвальных поверхностей

Кюрета Gracey 11/12 Макро

- LMErgoSense LM 211-212AF ES
- LMErgoMax LM 211-212AF XSI
- LMErgoNorm LM 211-212AF SI

- Для мезиальных поверхностей премоляров и моляров

Кюрета Gracey 13/14 Макро

- LMErgoSense LM 213-214AF ES
- LMErgoMax LM 213-214AF XSI
- LMErgoNorm LM 213-214AF SI

- Для дистальных поверхностей премоляров и моляров

КЮРЕТЫ RIGID GRACEY

Тело рабочей части более толстое и жесткое, а кончик рабочей части шире, чем у стандартной модели. Можно работать с большим нажимом.

Кюрета Gracey 1/2 Rigid

- LMErgoSense LM 201-202R ES
- LMErgoMax LM 201-202R XSI
- LMErgoNorm LM 201-202R SI

- Для резцов и премоляров

Кюрета Gracey 7/8 Rigid

- LMErgoSense LM 207-208R ES
- LMErgoMax LM 207-208R XSI
- LMErgoNorm LM 207-208R SI

- Для премоляров и моляров
- Для щечных, мезиальных и лингвальных поверхностей

Кюрета Gracey 11/12 Rigid

- LMErgoSense LM 211-212R ES
- LMErgoMax LM 211-212R XSI
- LMErgoNorm LM 211-212R SI

- Для мезиальных поверхностей премоляров и моляров

Кюрета Gracey 13/14 Rigid


- LMErgoSense LM 213-214R ES
- LMErgoMax LM 213-214R XSI
- LMErgoNorm LM 213-214R SI

- Для дистальных поверхностей премоляров и моляров

Кюрета Gracey 15/16 Rigid

- LMErgoSense LM 245-246R ES
- LMErgoMax LM 245-246R XSI
- LMErgoNorm LM 245-246R SI

- Для мезиальных поверхностей моляров
- Более изогнутая рабочая часть, чем у Кюреты Gracey 11/12 для лучшего доступа

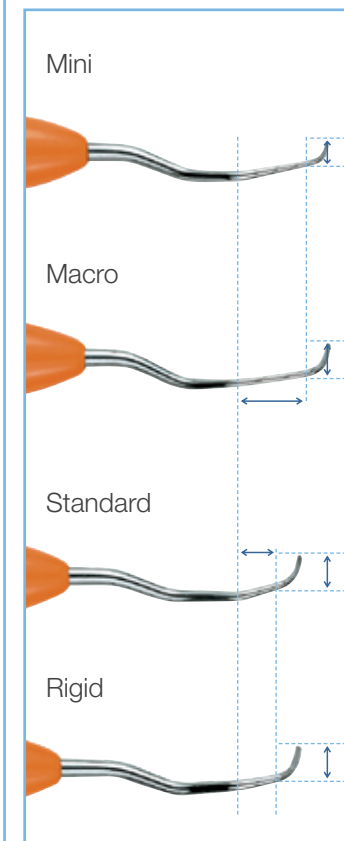


**КЮРЕТЫ GRACEY
МЕЗИАЛЬНО-ДИСТАЛЬНЫЕ**

Сочетание мезиальной и дистальной рабочих частей в одном инструменте. Позволяют обработать один квадрант без смены инструмента.

Дистальная

Все мезиально-дистальные кюреты имеют кодировку цветными кодовыми кольцами, чтобы можно было идентифицировать рабочую часть.

Мезиальная

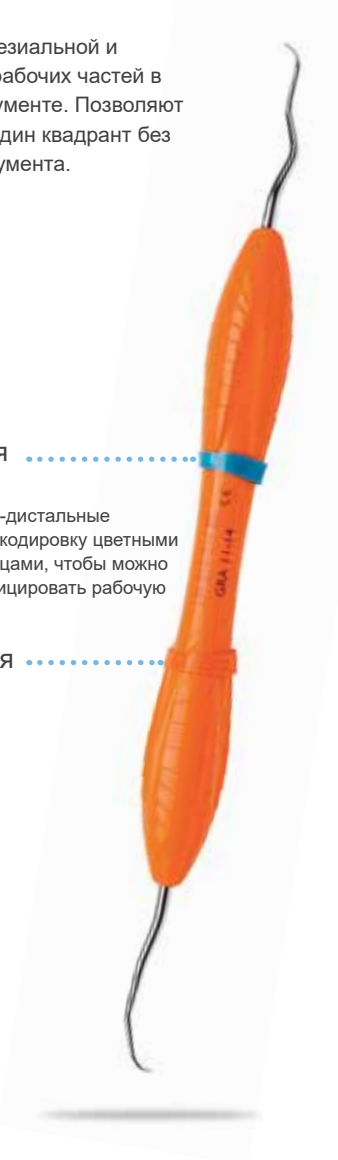

Кюрета Gracey 11/14

- LMErgoSense** LM 211-214 ES
- LMErgoMax** LM 211-214 XSI
- LMErgoNorm** LM 211-214 SI

Кюрета Gracey 12/13

- LMErgoSense** LM 212-213 ES
- LMErgoMax** LM 212-213 XSI
- LMErgoNorm** LM 212-213 SI

Кюрета Gracey 15/18

- LMErgoSense** LM 245-248 ES
- LMErgoMax** LM 245-248 XSI
- LMErgoNorm** LM 245-248 SI

Кюрета Gracey 16/17

- LMErgoSense** LM 246-247 ES
- LMErgoMax** LM 246-247 XSI
- LMErgoNorm** LM 246-247 SI

**КЮРЕТЫ GRACEY
МЕЗИАЛЬНО-ДИСТАЛЬНЫЕМИНИ**

Сочетание мезиальной и дистальной рабочих частей в одном инструменте. Позволяют обработать один квадрант без смены инструмента.

Модель Мини имеет удлиненный нижний сегмент рабочей части и укороченную рабочую часть по сравнению со стандартной моделью. Подходит для работы в узких глубоких карманах.

Кюрета Mini Gracey 11/14

- LMErgoSense** LM 211-214M ES
- LMErgoMax** LM 211-214M XSI
- LMErgoNorm** LM 211-214M SI

Кюрета Mini Gracey 12/13

- LMErgoSense** LM 212-213M ES
- LMErgoMax** LM 212-213M XSI
- LMErgoNorm** LM 212-213M SI

Кюрета Mini Gracey 15/18

- LMErgoSense** LM 245-248M ES
- LMErgoMax** LM 245-248M XSI
- LMErgoNorm** LM 245-248M SI

Кюрета Mini Gracey 16/17

- LMErgoSense** LM 246-247M ES
- LMErgoMax** LM 246-247M XSI
- LMErgoNorm** LM 246-247M SI

**КЮРЕТЫ GRACEY
МЕЗИАЛЬНО-ДИСТАЛЬНЫЕ МАКРО**

Сочетание мезиальной и дистальной рабочих частей в одном инструменте. Позволяют обработать один квадрант без смены инструмента.


Серия Макро - это сочетание режущей части стандартной модели и удлиненного нижнего сегмента рабочей части модели мини. Подходит для работы в глубоких периодонтальных карманах.

Кюрета Macro Gracey 11/14

- LMErgoSense** LM 211-214AF ES
- LMErgoMax** LM 211-214AF XSI
- LMErgoNorm** LM 211-214AF SI

Кюрета Macro Gracey 12/13

- LMErgoSense** LM 212-213AF ES
- LMErgoMax** LM 212-213AF XSI
- LMErgoNorm** LM 212-213AF SI

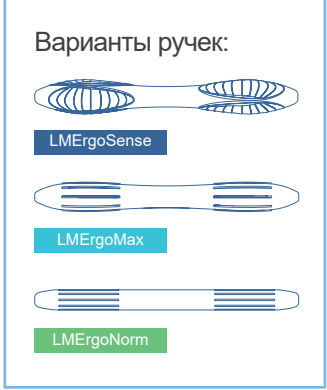

ИНСТРУМЕНТЫ LM-ERGOMIX

LM-ErgoMix - это экономичная, эргономичная и экологичная замена обычным инструментам. Насадки легко меняются за несколько секунд без использования дополнительных инструментов.

Используйте и стерилизуйте инструменты LM-ErgoMix также, как обычные инструменты. Герметичная конструкция гарантирует высокий уровень гигиены.

Преимущества:

- Всегда острые инструменты
- Экономия времени на заточке инструментов
- Сокращение расходов
- Возможность создания индивидуальных комбинаций рабочих частей



ИНСТРУМЕНТЫ LM-ERGOMIX С НАСАДКАМИ ИЗ СТАЛИ LM-DURAGRADEMAX



Скейлер серповидный, микро

LM-ErgoMix LM 301-302 EM

- Деликатная рабочая часть
- Специально для узких межзубных пространств



Скейлер серповидный LM204S

LM-ErgoMix LM 303-304 EM

- Резко изогнутое тело инструмента и очень тонкая рабочая часть



Скейлер H6-H7

LM-ErgoMix LM 146-147 EM



Скейлер Laplander

LM-ErgoMix LM 148-149 EM

- Аналогичен скейлеру H6-H7, но с боковым изгибом
- Легкий доступ к молярам и проксимальным поверхностям



Кюрета McCall 13S-14S

LM-ErgoMix LM 222-223 EM

- Для резцов и премоляров



Кюрета Columbia 4L-4R

LM-ErgoMix LM 219-220 EM

- Для резцов, клыков и премоляров



Кюрета Mini Syntette

LM-ErgoMix LM 215-216M EM

- Модель Мини идеальна для узких глубоких карманов
- Особенно удобна для обработки небных и лингвальных поверхностей резцов и премоляров



Кюрета Gracey 1/2

LM-ErgoMix LM 201-202 EM

- Для резцов и премоляров



Кюрета Gracey 11/12

LM-ErgoMix LM 211-212 EM

- Для мезиальных поверхностей премоляров и моляров



Кюрета Gracey 13/14

LM-ErgoMix LM 213-214 EM

- Для дистальных поверхностей премоляров и моляров



Кюрета Mini Gracey 1/2

LMErgoMix LM 201-202M EM

- Для резцов и премоляров



Кюрета Mini Gracey 11/12

LMErgoMix LM 211-212M EM

- Для мезиальных поверхностей премоляров и моляров



Кюрета Mini Gracey 13/14

LMErgoMix LM 213-214M EM

- Для дистальных поверхностей премоляров и моляров

ТИТАНОВЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ

Серия инструментов для ухода за имплантами. Инструменты ErgoMix обеспечивают тактильную чувствительность и оптимальную жесткость.

ЛУЧШИЙ ВЫБОР



Насадки изготовлены из чувствительного, но эффективного титана, который не повредит поверхности.

Кюрета для имплантов, универсальная Implant Mini Universal curette

LMErgoMix

LM 283-284MTi EM

- Деликатная рабочая часть
- Специально для узких межзубных промежутков



Кюрета для имплантов Implant Mini Gracey 1/2

LMErgoMix

LM 201-202MTi EM

- Для резцов и премоляров



Кюрета для имплантов Implant Mini Gracey 11/12

LMErgoMix

LM 211-212MTi EM

- Для мезиальных поверхностей премоляров и моляров



Кюрета для имплантов Implant Mini Gracey 13/14

LMErgoMix

LM 213-214MTi EM

- Для дистальных поверхностей премоляров и моляров

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ИНСТРУМЕНТАМ LM-ERGOMIX

Сменные ручки

Ручка ErgoMix, серая LM 9010 EM

Ручка ErgoMix, темно-серая LM 9011 EM

Сменные крепления (2 шт.)

Цвет: оранжевый LM 9020 EM

Цвет: светло-голубой LM 9021 EM

Цвет: серый LM 9022 EM

Цвет: желтый LM 9023 EM

Цвет: темно-серый LM 9024 EM

Цвет: красный LM 9025 EM

Сменные насадки из стали LM-DuraGradeMAX

Micro Sickle L LM 301 EM

Micro Sickle R LM 302 EM

Mini Syntette L LM 215M EM

Mini Syntette R LM 216M EM

Mini Gracey 1 LM 201M EM

Mini Gracey 2 LM 202M EM

Mini Gracey 11 LM 211M EM

Mini Gracey 12 LM 212M EM

Mini Gracey 13 LM 213M EM

Mini Gracey 14 LM 214M EM

Scaler H6 LM 146EM

Scaler H7 LM 147EM

Laplander L LM 148EM

Laplander R LM 149EM

Gracey 1 LM 201EM

Gracey 2 LM 202EM

Gracey 11 LM 211EM

Gracey 12 LM 212EM

Gracey 13 LM 213EM

Gracey 14 LM 214EM

Columbia 4L LM 219EM

Columbia 4R LM 220EM

McCall 13S LM 222EM

McCall 14S LM 223EM

Sickle LM 204S L LM 303EM

Sickle LM 204S R LM 304EM

Сменные насадки из титана

Implant Mini Universal Curette L LM 283MTi EM

Implant Mini Universal Curette R LM 284MTi EM

Implant Mini Gracey 1 LM 201MTi EM

Implant Mini Gracey 2 LM 202MTi EM

Implant Mini Gracey 11 LM 211MTi EM

Implant Mini Gracey 12 LM 212MTi EM

Implant Mini Gracey 13 LM 213MTi EM

Implant Mini Gracey 14 LM 214MTi EM

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ



Набор пародонтологический 1
LM-PerioSet 1

LMErgoSense LM 6652 ES

LMErgoMax LM 6652 XSI

В набор входит:
Кассета LM-Servo 5 (LM 6650),
Скейлер серповидный, мини (LM 311-312),
Кюрета универсальная McCall 17-18 (LM 277-278),
Кюрета Gracey 1/2 (LM 201-202),
Кюрета Gracey 11/12 (LM 211-212),
Кюрета Gracey 13/14 (LM 213-214)



Набор пародонтологический 2
LM-PerioSet 2

LMErgoSense LM 6682 ES

LMErgoMax LM 6682 XSI

В набор входит: Кассета LM-Servo 8 (LM 6680),
Скейлер серповидный, мини (LM 311-312),
Кюрета универсальная McCall 17-18 (LM 277-278),
Кюрета Gracey 1/2 (LM 201-202),
Кюрета Gracey 9/10 (LM 209-210),
Кюрета Gracey 11/12 (LM 211-212),
Кюрета Gracey 13/14 (LM 213-214),
Кюрета Mini Gracey 15/16 (LM 245-246M),
Кюрета Mini Gracey 17/18 (LM 247-248M)



Набор пародонтологический
LM-Fancy5

LMErgoSense LM 6820 ES

LMErgoMax LM 6820 XSI

В набор входит:
Кассета LM-Servo 5 (LM 6650),
Ручка для зеркала и зеркало (25ESi и 10P),
Зонд (LM 8-520B),
Скейлер серповидный (LM 301-302),
Кюрета Gracey 11/12 (LM 211-212),
Кюрета Gracey 13/14 (LM 213-214)



LMPerioKit
Набор составлен
доктором Giano Ricci



Пародонтологический набор от Style Italiano

LMErgoSense LM 6842 ES

В набор входит
Кюрета Langer для имплантатов (LM 283-284MTI EM),
Кюрета с алмазным напылением SV 5-6 (LM 255-256D ES),
Кюрета Mini Gracey 13/14 (LM 213-214M ES),
Кюрета Mini Gracey 11/12 (LM 211-212M ES),
Кюрета Mini Gracey 7/8 (LM 207-208M ES),
Кюрета универсальная McCall 17S-18S (LM 279-280 ES),
Зонд (LM 54D ES),
Зонд для фуркации (LM 20B-21B ES),
Кассета LM-Servo 8 (6680)

ЛОЖКОВИДНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

Для удаления размягченного дентина и временных пломб.



Описание:

- Рабочая часть в форме ложки
- Закругленный кончик
- Длинный режущий край облегчает очистку больших кариозных полостей.



Ложковидный экскаватор, 1.0 мм



Ложковидный экскаватор, 1.5 мм

Варианты ручек:



LM ErgoSense



LM ErgoMax



LM ErgoNorm

- LM ErgoSense LM 522-523 ES
- LM ErgoMax LM 522-523 XSI
- LM ErgoNorm LM 522-523 SI

- LM ErgoSense LM 533-534 ES
- LM ErgoMax LM 533-534 XSI
- LM ErgoNorm LM 533-534 SI

КРУГЛЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

Лечение кариеса:

- Для удаления размягченного дентина
- Для удаления временных пломб

Хирургия:

- Для разделения тканей пародонта перед операциями
- Для очистки лунки после удаления зуба



Описание:

- Круглая рабочая часть
- Изогнутый режущий край



Круглый экскаватор, 1.0 мм

- LM ErgoSense LM 61-62 ES
- LM ErgoMax LM 61-62 XSI
- LM ErgoNorm LM 61-62 SI



Круглый экскаватор, 1.5 мм

- LM ErgoSense LM 63-64 ES
- LM ErgoMax LM 63-64 XSI
- LM ErgoNorm LM 63-64 SI



Круглый экскаватор, 2.0 мм

- LM ErgoSense LM 65-66 ES
- LM ErgoMax LM 65-66 XSI
- LM ErgoNorm LM 65-66 SI

ЭМАЛЕВЫЕ НОЖИ



Эмалевый нож, 1.2 мм, дистальный

- LM ErgoSense LM 121-122 ES
- LM ErgoMax LM 121-122 XSI
- LM ErgoNorm LM 121-122 SI



Эмалевый нож, 1.2 мм, мезиальный

- LM ErgoSense LM 125-126 ES
- LM ErgoMax LM 125-126 XSI
- LM ErgoNorm LM 125-126 SI

ТРЕХУГЛОВЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Лечение кариеса:


- Для удаления размягченного дентина
- Для препарирования эмали при подготовке полостей
- Для горизонтальной финишной обработки внешних краев полости

Пародонтология:

- Для удаления зубных отложений с труднодоступных участков, таких как лингвальные поверхности фронтальной группы зубов нижней челюсти
- Для очистки вогнутых поверхностей корня и зоны фуркации

Хирургия:

- Для удаления грануляционной ткани при операциях в апикальной вене

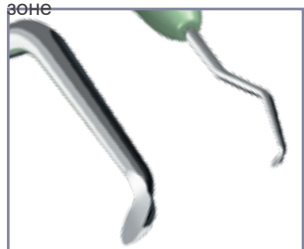

Плечо и рабочая часть имеют тройной изгиб, что позволяет совершать "обратное" действие

Треугольный круглый экскаватор обратного действия, 1.0 мм

- **LMErgoSense** LM 611-621 ES
- **LMErgoMax** LM 611-621 XSI
- **LMErgoNorm** LM 611-621 SI



Треугольный круглый экскаватор обратного действия, 1.5 мм

- **LMErgoSense** LM 631-641 ES
- **LMErgoMax** LM 631-641 XSI
- **LMErgoNorm** LM 631-641 SI



Треугольный круглый экскаватор обратного действия, 2.0 мм

- **LMErgoSense** LM 651-661 ES
- **LMErgoMax** LM 651-661 XSI
- **LMErgoNorm** LM 651-661 SI



Треугольный круглый экскаватор обратного действия, 3.5 мм

- **LMErgoSense** LM 671-681 ES
- **LMErgoMax** LM 671-681 XSI
- **LMErgoNorm** LM 671-681 SI

ШПАТЕЛЬ



Шпатель

- **LMErgoSense** LM 450-460 ES
- **LMErgoMax** LM 450-460 XSI
- **LMErgoNorm** LM 450-460 SI

УКЛАДЧИКИ РЕТРАКЦИОННОЙ НИТИ

Для укладки ретракционной нити в десневой карман.



Закругленный кончик не повреждает десну. Правильно развернутая рабочая часть позволяет укладывать нить как вокруг зуба, так и вертикальными движениями.



Инструмент для укладки ретракционной нити, 2.0 мм

- **LMErgoSense** LM 490-491 ES
- **LMErgoMax** LM 490-491 XSI
- **LMErgoNorm** LM 490-491 SI



Инструмент для укладки ретракционной нити, 2.6 мм

- **LMErgoSense** LM 492-493 ES
- **LMErgoMax** LM 492-493 XSI
- **LMErgoNorm** LM 492-493 SI

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ПОДКЛАДКИ

Для нанесения тонкой подкладки на поверхность дентина.



Инструмент для наложения подкладки, жесткий

- LMErgoSense** LM 29H-30H ES
- LMErgoMax** LM 29H-30H XSI
- LMErgoNorm** LM 29H-30H SI



Инструмент для наложения подкладки, гибкий

- LMErgoSense** LM 30-34 ES
- LMErgoMax** LM 30-34 XSI
- LMErgoNorm** LM 30-34 SI

- Гибкий кончик облегчает доступ к труднодоступным областям



Инструмент для наложения подкладки, жесткий

- LMErgoSense** LM 30H-34 ES
- LMErgoMax** LM 30H-34 XSI
- LMErgoNorm** LM 30H-34 SI

ШТОПФЕРЫ



Микропакер 0.8 мм

- LMErgoSense** LM 330-331 ES
- LMErgoMax** LM 330-331 XSI
- LMErgoNorm** LM 330-331 SI



Штопфер цилиндрический 0.8-1.2 мм

- LMErgoSense** LM 330-350 ES
- LMErgoMax** LM 330-350 XSI
- LMErgoNorm** LM 330-350 SI



Штопфер цилиндрический 1.0-1.5 мм

- LMErgoSense** LM 340-360 ES
- LMErgoMax** LM 340-360 XSI
- LMErgoNorm** LM 340-360 SI



Штопфер цилиндрический 1.2-2.0 мм

- LMErgoSense** LM 350-380 ES
- LMErgoMax** LM 350-380 XSI
- LMErgoNorm** LM 350-380 SI



Штопфер цилиндрический 1.8-2.5 мм

- LMErgoSense** LM 370-390 ES
- LMErgoMax** LM 370-390 XSI
- LMErgoNorm** LM 370-390 SI

ШТОПФЕР



Штопфер Burnisher

- LMErgoSense** LM 31-32 ES
- LMErgoMax** LM 31-32 XSI
- LMErgoNorm** LM 31-32 SI



Штопфер - шарик, 1.5-2.5 мм

- LMErgoSense LM 471-473 ES
- LMErgoMax LM 471-473 XSI
- LMErgoNorm LM 471-473 SI



Штопфер 27-29

- LMErgoSense LM 476-477 ES
- LMErgoMax LM 476-477 XSI
- LMErgoNorm LM 476-477 SI

- Для формирования окклюзионных поверхностей, фиссур, бугорков



Штопфер 21

- LMErgoSense LM 372-373 ES
- LMErgoMax LM 372-373 XSI
- LMErgoNorm LM 372-373 SI

- Для формирования окклюзионных поверхностей, фиссур, бугорков



Амальгамтреггер Markley 2

- LMErgoSense LM 354-355 ES
- LMErgoMax LM 354-355 XSI
- LMErgoNorm LM 354-355 SI

TRIMMEX

Многофункциональные инструменты для реставрации зубов, сочетают характеристики эмаливого ножа и экскаватора. Предназначены для работы на мезиальной и дистальной поверхностях, выпускаются каждый в двух размерах. Маленький подходит для микропрепарирования, большой для любых других полостей.



Инструмент для реставрации Trimmex, мезиальный 1, 1.0 мм

- LMErgoSense LM 6122-6222 ES
- LMErgoMax LM 6122-6222 XSI



Инструмент для реставрации Trimmex, мезиальный 2, 1.5 мм

- LMErgoSense LM 6322-6422 ES
- LMErgoMax LM 6322-6422 XSI



Инструмент для реставрации Trimmex, дистальный 1, 1.0 мм

- LMErgoSense LM 6121-6221 ES
- LMErgoMax LM 6121-6221 XSI



Инструмент для реставрации Trimmex, дистальный 2, 1.5 мм

- LMErgoSense LM 6321-6421 ES
- LMErgoMax LM 6321-6421 XSI

ИНСТРУМЕНТ CMF SHAPER

Рабочая часть в форме томагавка сочетает характеристики штопфера, моделировщика и инструмента для финишной обработки.



Угол 45° облегчает размещение композита как на дистальных, так и на мезиальных поверхностях.

Инструмент удаляет излишки материала со всех поверхностей после полимеризации, что особенно удобно при реставрациях II класса на интерпроксимальных поверхностях.

Многофункциональный инструмент CMF Shaper

- LMErgoSense LM 44-45 ES
- LMErgoMax LM 44-45 XSI

LM-Arte - это набор инновационных инструментов для эстетической реставрации, разработанный специально для послойной техники работы с композиционными материалами. Каждый инструмент имеет цветовую кодировку и название, отражающее его основную функцию, чтобы сделать работу стоматолога еще более простой, быстрой и эффективной.

Инструменты LM-Arte были разработаны в сотрудничестве со Style Italiano - группой стоматологов и исследователей, специализирующихся на эстетической стоматологии. Используйте QR для получения более подробной информации.

STYLEITALIANO
SHADE GUIDES



LM-Arte Applica

LMErgoSense LM 46-49 ES

LMErgoMax LM 46-49 XSI

- Очень тонкая и гибкая гладилка для внесения и эстетического моделирования композита




LM-Arte Modella

LMErgoSense LM 442-443 ES

LMErgoMax LM 442-443 XSI

- Очень тонкая и гибкая гладилка для внесения и эстетического моделирования композита

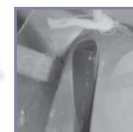

LM-Arte Condensa

LMErgoSense LM 488-489 ES

LMErgoMax LM 488-489 XSI

- Длинный и круглый штопфер для моделирования композита



Варианты ручек:




LMErgoSense



LMErgoMax



LMErgoNorm

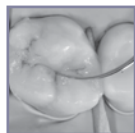

LM-Arte Fissura

- LMErgoSense** LM 481-487 ES
- LMErgoMax** LM 481-487 XSI

- Моделировщик с тонкими заостренными рабочими частями для моделирования жевательных поверхностей



LM-Arte Eccesso

- LMErgoSense** LM 307-308 ES
- LMErgoMax** LM 307-308 XSI


- Для удаления излишков материала



LM-Arte Misura

- LMErgoSense** LM 496-497 ES
- LMErgoMax** LM 496-497 XSI

- Для горизонтального и вертикального измерения толщины слоя композита при реставрации

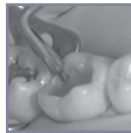

LM-Arte Posterior Misura

- LMErgoSense** LM 498-499 ES
- LMErgoMax** LM 498-499 XSI

- Разработана для горизонтального и вертикального измерения толщины композитного слоя при реставрации жевательных зубов
- Рабочая часть инструмента в форме вилки позволяет производить горизонтальное моделирование композитной стенки вместе с установленной матрицей.

НОВИНКА



Набор LM-Arte Set

- LMErgoSense** LM 6840 ES
- LMErgoMax** LM 6840 XSI

В состав входит:
LM-Arte Applica, LM-Arte Condensa, LM-Arte Fissura, LM-Arte Misura, LM-Arte Eccesso, Кассета LM-Servo 5

НАБОР LM-GENGIVA



Набор с ретракторами Gingival retracting kit

- LMErgoSense** LM 7556K ES
- LMErgoMax** LM 7556K XSI

В набор входит:
Инструмент LM-Gengiva / LM-MultiHolder PK III

Ретракторы (голубые) LM-Gingival Retractors
- Для максимально эффективного проведения процедур в пришеечной области.

- Ассортимент ретракторов трех размеров (90 шт, 30 шт. каждого размера):
- S для резцов
- M для премоляров
- XL для моляров

Нож LM-MultiLever
- Для легкого удаления насадок с инструмента

НОВИНКА

ТЕРАПИЯ – ИНСТРУМЕНТЫ С ТЕМНЫМ АЛМАЗОПОДОБНЫМ ПОКРЫТИЕМ

LM-ErgoSense Dark Diamond - инструменты с неприлипающим покрытием для легкого размещения и формирования композитных материалов.

Алмазоподобное покрытие уменьшает прилипание и обеспечивает точное и легкое моделирование.

Особенности Dark Diamond:

- Алмазоподобное покрытие
- Жесткая поверхность
- Гладкая поверхность
- Темное покрытие
- Ручка LM-ErgoSense

Преимущества:

- Материал не прилипает при размещении и моделировании
- Нечувствительно к царапинам
- Легкая очистка
- Максимальная контрастность и минимальные блики
- Исключительная точность работы

Инструменты Dark Diamond могут проходить такой же процесс очистки и стерилизации, как и все остальные инструменты LM.

Покрывание Dark Diamond делает поверхность исключительно гладкой и твердой и обеспечивает нанесение и моделирование композита без прилипания.

LM ErgoSense
DARK DIAMOND



Штопфер

LM ErgoSense LM 31-32DD ES

- Для внесения и моделирования композита



Штопфер - шарик, 1.5-2.5 мм

LMErgoSense LM 471-473DD ES

- Для моделирования композита



Моделировщик МН

LMErgoSense LM 708-709DD ES

- Для работы в больших полостях
- Рабочие части цилиндрической формы не застревают в материале во время полимеризации



Моделировщик МН мини

LMErgoSense LM 707-708DD ES

- Для работы в маленьких и средних полостях
- Рабочие части цилиндрической формы не застревают в материале во время полимеризации



Штопфер - Моделировщик IO

LMErgoSense LM 482-483DD ES

- Для внесения и моделирования композитного материала
- Конические рабочие части подходят для окклюзионных поверхностей



Гладилка - Штопфер

LMErgoSense LM 43-47DD ES

- Для внесения, уплотнения и моделирования материала



Гладилка - Штопфер

LMErgoSense LM 48-702DD ES

- Для внесения, уплотнения и моделирования материала



Гладилка - Обратная гладилка

LMErgoSense LM 444-445DD ES

- Для внесения и моделирования материала

Варианты ручек:



LMErgoSense



LMErgoMax



LMErgoNorm

ГЛАДИЛКИ С РЕЖУЩЕЙ ГРАНЬЮ



Инструмент для жидкотекучих материалов

- LMErgoSense** LM 484-485 ES
- LMErgoMax** LM 484-485 XSI

- Для легкой работы и формирования жидкотекучих материалов



Моделировщик МН

- LMErgoSense** LM 708-709 ES
- LMErgoMax** LM 708-709 XSI

- Для работы в больших полостях
- Рабочие части цилиндрической формы не застревают в материале во время полимеризации



Моделировщик МН мини

- LMErgoSense** LM 707-708 ES
- LMErgoMax** LM 707-708 XSI

- Для работы в маленьких и средних полостях
- Рабочие части цилиндрической формы не застревают в материале во время полимеризации



Штопфер - Моделировщик IO р

- LMErgoSense** LM 482-702 ES
- LMErgoMax** LM 482-702 XSI
- LMErgoNorm** LM 482-702 SI

- Комбинированный инструмент для моделирования поверхности премоляров



Штопфер - Моделировщик IO

- LMErgoSense** LM 482-483 ES
- LMErgoMax** LM 482-483 XSI
- LMErgoNorm** LM 482-483 SI

- Конические рабочие части идеально подходят для окклюзионных поверхностей
- Для всех видов композита



Штопфер - Моделировщик IO

- LMErgoSense** LM 483-703 ES
- LMErgoMax** LM 483-703 XSI
- LMErgoNorm** LM 483-703 SI

- Комбинированный инструмент для моделирования поверхности моляров



Гладилка - Штопфер

- LMErgoSense** LM 43-47 ES
- LMErgoMax** LM 43-47 XSI
- LMErgoNorm** LM 43-47 SI

- Для внесения, уплотнения и моделирования материала
- Для фронтальной группы



Гладилка - Штопфер

- LMErgoSense** LM 48-702 ES
- LMErgoMax** LM 48-702 XSI
- LMErgoNorm** LM 48-702 SI

- Для внесения, уплотнения и моделирования материала



Штопфер, 1,5-2,5 мм

- LMErgoSense** LM 702-703 ES
- LMErgoMax** LM 702-703 XSI
- LMErgoNorm** LM 702-703 SI

- Для внесения и моделирования материала



Гладилка - Обратная гладилка

- LMErgoSense** LM 446-447 ES
- LMErgoMax** LM 446-447 XSI
- LMErgoNorm** LM 446-447 SI

- Для внесения и моделирования материала



Гладилка - Обратная гладилка, мини

- LMErgoSense** LM 444-445 ES
- LMErgoMax** LM 444-445 XSI
- LMErgoNorm** LM 444-445 SI

- Для внесения и моделирования материала

ГЛАДИЛКИ С РЕЖУЩЕЙ ГРАНЬЮ



Гладилка с режущей гранью 1/2 Hollenback

- LMErgoSense** LM 741-751 ES
- LMErgoMax** LM 741-751 XSI
- LMErgoNorm** LM 741-751 SI



Гладилка с режущей гранью Nyström I

- LMErgoSense** LM 74-75 ES
- LMErgoMax** LM 74-75 XSI
- LMErgoNorm** LM 74-75 SI



Гладилка с режущей гранью Nyström III

- LMErgoSense** LM 76-77 ES
- LMErgoMax** LM 76-77 XSI
- LMErgoNorm** LM 76-77 SI



Гладилка с режущей гранью Maehlum

- LMErgoSense** LM 71-73 ES
- LMErgoMax** LM 71-73 XSI
- LMErgoNorm** LM 71-73 SI



Универсальный инструмент с режущей гранью

- LMErgoSense** LM 71-72 ES
- LMErgoMax** LM 71-72 XSI
- LMErgoNorm** LM 71-72 SI

- Для окклюзионных и проксимальных поверхностей



Режущий инструмент для реставрации Cleoid-Discoid

- LMErgoSense** LM 731-732 ES
- LMErgoMax** LM 731-732 XSI
- LMErgoNorm** LM 731-732 SI

УДАЛЕНИЕ ИЗЛИШКОВ МАТЕРИАЛА



Инструмент для удаления излишков материала

- LMErgoSense** LM 785-795 ES
- LMErgoMax** LM 785-795 XSI
- LMErgoNorm** LM 785-795 SI

- Для удаления излишков адгезива, цемента и композита



Инструмент для удаления излишков материала, МИНИ

- LMErgoSense** LM 784-794 ES
- LMErgoMax** LM 784-794 XSI
- LMErgoNorm** LM 784-794 SI

- Для удаления излишков материала в узких межзубных пространствах

УДАЛЕНИЕ ПЛОМБ



Инструмент для удаления пломб

- LMErgoSense** LM 764-766 ES
- LMErgoMax** LM 764-766 XSI
- LMErgoNorm** LM 764-766 SI

- Для удаления временных пломб и коронок
 - Для удаления мостов во время примерки

СНЯТИЕ КОРОНОК



Сначала делается прорезь от нижнего края коронки до окклюзионной части. Прорезь должна быть глубокой, до цемента. Рабочая часть инструмента помещается в разрез и раздвигает края коронки. Инструмент поворачивается до тех пор пока коронка не отсоединится. Рабочая часть не выскальзывает из канавки даже при приложении большой силы.



Инструмент для снятия искусственных коронок

- LMErgoSense** LM 767-768 ES
- LMErgoMax** LM 767-768 XSI

- Двухугольная рабочая часть с углом разворота 45°
 - Для снятия всех типов коронок в ротовой полости

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ



Набор для реставрации LM-CompoSet


- LMErgoSense** LM 6657 ES
- LMErgoMax** LM 6657 XSI

В состав входит:
 Кассета LM-Servo 5 (LM 6650), Гладилка - Обратная гладилка (мини) (LM 444-445), Гладилка - штопфер (LM 43-47), Штопфер (LM 702-703), Моделирующий инструмент IO (LM 482-483), Инструмент для удаления излишков (LM 784-794)

ДЕРЖАТЕЛЬ ШТРИПСОВ LM-CELLO

Профилактика:

- Удаление налета с контактных поверхностей
- Предварительная обработка перед использованием зубной нити и зубочистки
- При финишной обработке проксимальных поверхностей может использоваться для внесения пасты

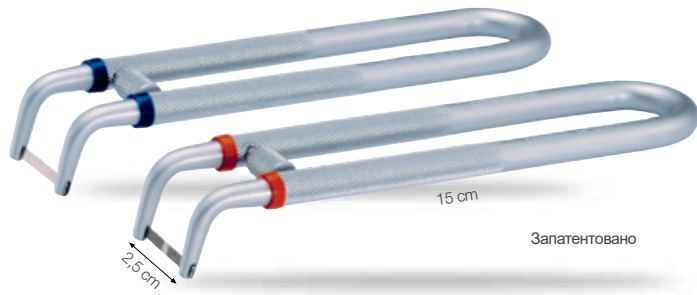

Держатель штрипсов LM-Cello
LM 2010 C

Терапия:

- Обработка контактных поверхностей
- Подготовка перед использованием матричных систем и коффердама

Ортопедия:

- Обработка цементных швов на ламинатах, коронках и литых пломбах


Варианты штрипсов

упаковка 50 шт., зернистость 60µm

Используйте кодовые кольца LM для маркировки разных видов штрипсов.

Ортодонтия:

- Сепарация зубов

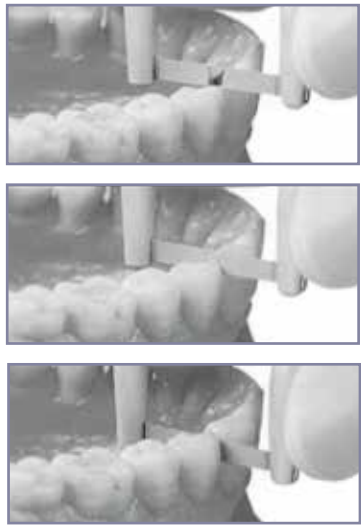

Штрипсы с промежутками

- Гладкая поверхность штрипсов используется для обработки особенно плотных контактов



LM 5502
- Односторонние, 2 мм, ширина 0.11 мм



LM 5503
- Односторонние, 3 мм, ширина 0.11 мм



LM 5503D
- Двусторонние, 3 мм, ширина 0.19 м

Штрипсы без промежутков



LM 5512
- Односторонние, 2 мм, ширина 0.11 мм



LM 5513
- Односторонние, 3 мм, ширина 0.11 мм



LM 5513D
- Двусторонние, 3 мм, ширина 0.19 м

СИСТЕМА LM-MULTIHOLDER

Держатели LM-MultiHolder в сочетании с различными вариантами съемных пластиковых насадок – действительно многофункциональные инструменты!

- Различные варианты изгибов инструмента обеспечивают возможность работы даже на труднодоступных участках
- Оптимальное сочетание стали и пластика - плечо инструмента жесткое, а рабочая часть может быть гибкой, когда это необходимо.



Держатель для насадок LM-MultiHolder PK I

- LMErgoSense LM 750-756 ES
- LMErgoMax LM 750-756 XSI
- LMErgoNorm LM 750-756 SI



Держатель для насадок LM-MultiHolder PK II

- LMErgoSense LM 752-754 ES
- LMErgoMax LM 752-754 XSI
- LMErgoNorm LM 752-754 SI



Держатель для насадок LM-MultiHolder PK III





- LMErgoSense LM 752-756 ES
- LMErgoMax LM 752-756 XSI

- Часть концепции Style Italiano

Варианты ручек:

- LMErgoSense
- LMErgoMax
- LMErgoNorm

НАСАДКИ ДЛЯ LM-MULTIHOLDER

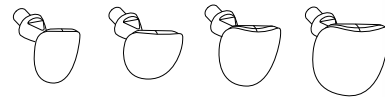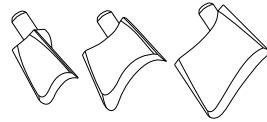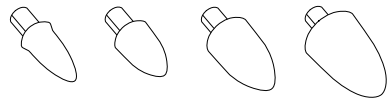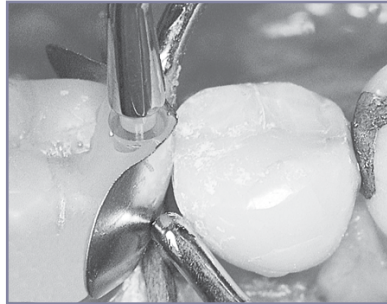

Нож для снятия насадок
LM-MultiLever

LM 7550
- Для удаления пластиковых насадок



Насадка для восстановления контактного пункта

Прозрачные насадки для формирования правильного и плотного апроксимального контакта.

- Подходят ко всем видам матриц
- Не прилипают к композитам
- Одноразовые

4 вида - для полостей разных размеров
60 шт./ упаковка

- LM 7622 XS
- LM 7624 S
- LM 7626 M
- LM 7628 L
- LM 7620 Ассортимент насадок - 120 шт. (по 30 шт. / каждого размера)

Десневые ретракторы LM-Gingival (голубые)

Для создания оптимальных условий работы в придесневой зоне.

- Одноразовые

3 размера,
60 шт./ упаковка

- LM 7502 S для резцов
- LM 7504 M для премоляров
- LM 7506 XL для моляров
- LM 7500 Ассортимент насадок - 90 шт. (по 30 шт. / каждого размера)

Пришеечные матрицы LM-Cervical Matrices

Для придания анатомически правильной формы пломбам в пришеечной области.

- Защищают от влаги
- Предотвращают появление воздушных пузырьков
- Одноразовые

4 вида разных форм и размеров,
60 шт./ упаковка

- LM 7602 для резцов
- LM 7604 для клыков и премоляров
- LM 7606 для маленьких моляров
- LM 7608 для больших моляров
- LM 7600 Ассортимент насадок - 120 шт. (по 30 шт. / каждого размера)

Набор LM-MultiHolder IntroKit

Содержит инструменты LM-MultiHolder PK I и PK II (XSI или ES), нож MultiLever и образцы всех вариантов насадок.

Всего 44 насадки, по 4 каждого вида и размера.

- LM 7555K ES
- LM 7555K XSI
- Можно заказать отдельно только образцы всех видов насадок:
- LM 7555

ЗОНД



Длинный и острый кончик рабочей части облегчает обнаружение и раскрытие корневых каналов и обеспечивает доступ другим инструментам.



ВАЖНО! Используйте инструмент только по назначению!



Зонд для поиска устьев корневых каналов

- LMErgoSense** LM 27-28 ES
- LMErgoMax** LM 27-28 XSI
- LMErgoNorm** LM 27-28 SI

Варианты ручек:



LMErgoSense



LMErgoMax



LMErgoNorm

ЭКСКАВАТОРЫ

От круглых экскаваторов инструменты для устьев корневых каналов отличаются более длинным плечом, расположенным под более острым углом.

■ Удлиненное и развернутое под правильным углом плечо инструмента в комбинации с углом рабочей части обеспечивают эффективное препарирование всех типов полостей.

■ Эффективны при очистке пульпы, определении корневых каналов, так же как при удалении временных пломб.



Экскаватор для устьев корневых каналов, 1.0 мм

- LMErgoSense** LM 612-622 ES
- LMErgoMax** LM 612-622 XSI
- LMErgoNorm** LM 612-622 SI



Экскаватор для устьев корневых каналов, 1.5 мм

- LMErgoSense** LM 632-642 ES
- LMErgoMax** LM 632-642 XSI
- LMErgoNorm** LM 632-642 SI



Экскаватор для устьев корневых каналов, 2.0 мм

- LMErgoSense** LM 652-662 ES
- LMErgoMax** LM 652-662 XSI
- LMErgoNorm** LM 652-662 SI

ЭНДОСПРЕДЕРЫ

Для уплотнения материала в канале при латеральной конденсации.



Эндо Спредер 0.4 мм

- LMErgoSense** LM 24 ES
- LMErgoMax** LM 24 XSI



Эндо Спредер 0.23 мм

- LMErgoSense** LM 22 ES
- LMErgoMax** LM 22 XSI

ЭНДОПЛАГГЕР

Для вертикальной конденсации гуттаперчевых штифтов.



Эндоплаггер, 0.5 - 1.0 мм

- LMErgoSense** LM 41-42 ES
- LMErgoMax** LM 41-42 XSI
- LMErgoNorm** LM 41-42 SI

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЭНДОДОНТИЯ

Для процедуры ретроградного препарирования.



Для удаления деминерализованного дентина, гуттаперчи и цемента из апикальной области.



Апекскаватор GFV 1.0 мм

- LMErgoSense** LM 613-614 ES
- LMErgoMax** LM 613-614 XSI
- LMErgoNorm** LM 613-614 SI

- Для работы на мезиальной, дистальной и язычной поверхностях

ЛУЧШИЙ ВЫБОР

Уверенное атравматичное удаление

Всемирно известная эргономичность и тактильная чувствительность инструментов LM теперь и в инструментах для удаления


- Эргономичный дизайн - удобно держать в руке и легко поворачивать
- Безопасная поверхность LM-ErgoTouch - мягкая, не скользит, легко удерживается в руке
- Хорошая сбалансированность - удобство и легкость в работе
- Легкий вес - уменьшение нагрузки
- Цветовая кодировка - легкость идентификации
- Сталь LM-DuraGradeMAX - прочное и острое лезвие
- Полная герметичность на стыке рабочей части и ручки инструмента - улучшенная гигиена



Лучший продукт 2014,
Dental Product Shopper

LM-LIFTOUT

Люксаторы LM-LiftOut предназначены для удаления зубов с минимальным уровнем травматичности. Это особенно важно для быстрого заживления и последующей имплантации. Тонкое лезвие инструмента вводится в периодонтальную щель, инструмент движется в сторону апекса одновременно с расшатывающим движением "туда-обратно". Инструменты LM-LiftOut нельзя использовать в качестве элеватора!

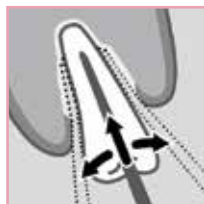

ПРЯМЫЕ




Люксатор LM-LiftOut S2
LM 812220

Люксатор LM-LiftOut S3
LM 812230

Люксатор LM-LiftOut S4
LM 812240

Люксатор LM-LiftOut S5
LM 812250

ИЗОГНУТЫЕ

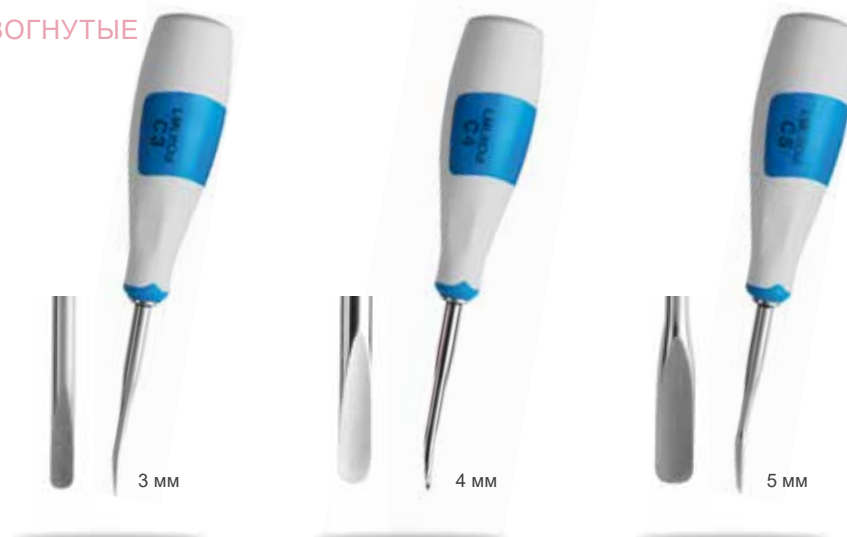


Люксатор LM-LiftOut C3
LM 812430

Люксатор LM-LiftOut C4
LM 812440

Люксатор LM-LiftOut C5
LM 812450

LM-SLIMLIFT

Инструменты LM-SlimLift специально разработаны для работы в местах, которые недоступны при работе обычными инструментами для люксации. Они обеспечивают максимально атравматичное извлечение зуба. Это особенно важно для быстрого заживления. Исключительно тонкий кончик инструмента подходит для работы в очень узких периодонтальных областях. Инструмент нужно медленно двигать по направлению к корню одновременно с расшатывающим движением "туда-обратно". Инструменты LM-SlimLift нельзя использовать в качестве элеватора!

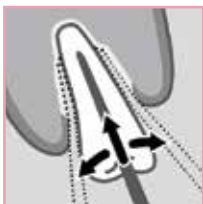

ПРЯМЫЕ



Люксатор LM-SlimLift S3
LM 812630



Люксатор LM-SlimLift S4
LM 812640



Люксатор LM-SlimLift S5
LM 812650

Исключительно тонкий дизайн лезвия для максимально атравматичного удаления.



ИЗОГНУТЫЕ



Люксатор LM-SlimLift C3
LM 812830



Люксатор LM-SlimLift C4
LM 812840



Люксатор LM-SlimLift C5
LM 812850

ХРАНЕНИЕ И УХОД



Кассета
LM 810001

Инструменты LM-LiftOut и LM-TwistOut поставляются в индивидуальных кассетах, которые защищают как сами инструменты, так и работников во время обработки. Кассета предотвращает протыкание стерилизационного пакета и делает процесс обработки более комфортным.

- Может иметь цветовую кодировку
- Совместима с системой LM-ServoMax



Камень для заточки
LM 818002

Заточка инструментов для удаления круглым камнем для заточки - это быстрый и легкий способ, благодаря которому инструменты будут оставаться острыми и готовыми к работе.

- подходит для инструментов LM-SlimLift, LM-LiftOut, LM-TwistOut и LM-RootOut

УДАЛЕНИЕ – LM-TWISTOUT

Элеваторы для удаления с применением силы.

Инструменты LM-TwistOut предназначены для использования в ситуациях, когда требуется приложение большей силы при извлечении зуба.



ПРЯМЫЕ




Элеватор LM-TwistOut S3
LM 814230

Элеватор LM-TwistOut S4
LM 814240

Элеватор LM-TwistOut S5
LM 814250

ИЗОГНУТЫЕ

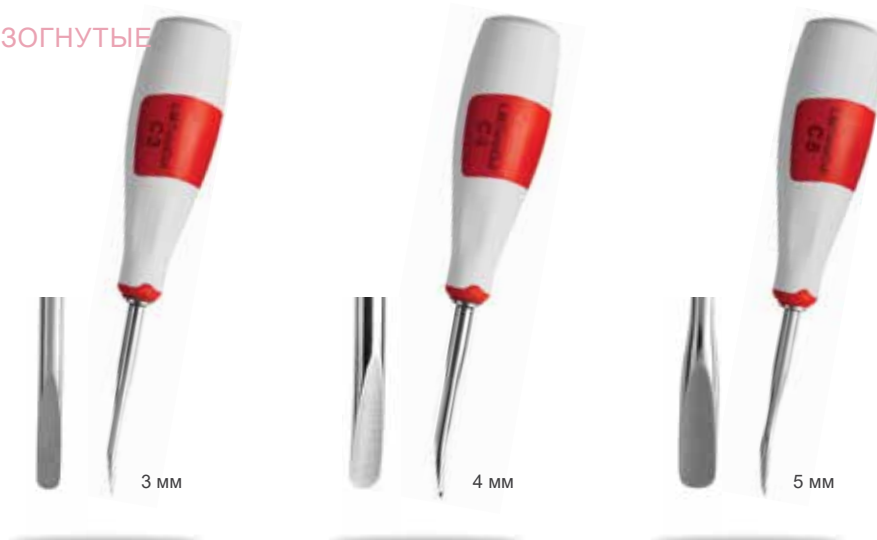

Элеватор LM-TwistOut C3
LM 814430

Элеватор LM-TwistOut C4
LM 814440

Элеватор LM-TwistOut C5
LM 814450

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБЛОМКОВ КОРНЕЙ



Инструмент для удаления
обломков корней

LMErgoSense LM 769-771 ES

LMErgoMax LM 769-771 XSI

- Для удаления корней
- Хорошо подходит для работы в труднодоступных местах

Инструмент для удаления
обломков корней
LM 812210

- Разработан для деликатного удаления обломков корней
- Не рекомендуется для сложных случаев
- Рабочая часть аналогична инструменту Heidbrink
- Эргономичная ручка

НОВИНКА

ИМПЛАНТАЦИЯ
– ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ИМПЛАНТАТОВОптимальная установка
имплантатаВыбор правильного мезиально-дистального положения
имплантата

Инструменты LM Implant Misura MR помогают в позиционировании первого сверла на правильном расстоянии от соседнего зуба или имплантата сохраняя биологию кости, задают правильное направление при мезиально-дистальной установке имплантата.

В результате такого позиционирования остается достаточное количество кости между имплантатом и зубом, таким образом костный гребень остается стабильным на протяжении долгого времени. Благодаря сохранению биологии кости и достаточного пространства достигается долговременный эстетический результат.

Серия инструментов
LM Implant Misura MR от **STYLEITALIANO**

Инструменты разработаны доктором Marco Redemagni (MD, DDS). Style Italiano - это группа врачей и исследователей, которые специализируются на эстетической восстановительной стоматологии.



“Эти инструменты особенно необходимы для позиционирования первого сверла


Marco Redemagni
MD, DDS

Больше информации на www.styleitaliano.org и www.facebook.com/styleitaliano.

Чтобы получить клиническую информацию по инструментам LM Implant Misura MR, используйте QR-код



Маркировка на рабочей части облегчает проверку щечно-лингвального положения сверла.

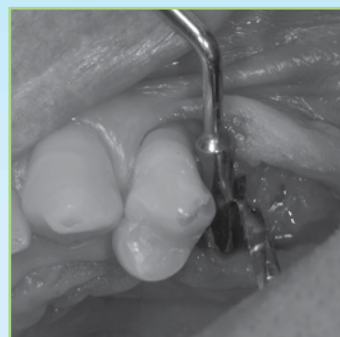

Установка импланта по отношению к живому зубу



Установка импланта по отношению к другим имплантатам



Выбирайте правильный размер

Доступны различные диаметры инструментов. Одна сторона инструмента (рабочая часть большего размера) - для позиционирования по отношению к имплантату, вторая (меньшего размера) для позиционирования по отношению к естественному зубу.

Выбирайте правильный размер инструмента на основе диаметра имплантата:

Цвет инструмента	Нач. сверло Ø		Расстояние в мм	
	1.5 мм	2.0 мм	Зуб - Имплантат	Имплантат - Имплантат
Серый	3.4-3.5	4.0	3.0	5.0
Зеленый	3.75	4.25	3.1	5.3
Желтый	4.0-4.1-4.15	4.6	3.3	5.6
Оранжевый	4.3	4.8	3.4	5.8
Голубой	4.8-4.85	5.35	3.7	6.3



Инструмент для позиционирования имплантатов
LM Implant Misura MR
3.0-5.0

LMErgoSense LM 400-401 ES



Инструмент для позиционирования имплантатов
LM Implant Misura MR
3.1-5.3

LMErgoSense LM 402-403 ES



Инструмент для позиционирования имплантатов
LM Implant Misura MR
3.3-5.6

LMErgoSense LM 404-405 ES



Инструмент для позиционирования имплантатов
LM Implant Misura MR
3.4-5.8

LMErgoSense LM 406-407 ES



Инструмент для позиционирования имплантатов
LM Implant Misura MR
3.7-6.3

LMErgoSense LM 408-409 ES



Набор
LM Implant Misura MR Kit

LMErgoSense LM 6843 ES

5 инструментов серии LM Implant Misura MR (3.0-5.0, 3.1-5.3, 3.3-5.6, 3.4-5.8, 3.7-6.3) и кассета на 5 инструментов LM-Servo 5

LMActivator

LM-Activator выравнивает зубы, активирует рост нижней челюсти и расширяет зубную дугу в сменном прикусе.

Преимущества

- Одновременно корректирует и выравнивает саггитальное и вертикальное соотношение челюстей.
- Слоты для зубов анатомической формы позволяют выравнивать отдельные зубы
- Возможно использовать в смешанном прикусе
 - Обнаруживает патологию на ранней стадии и позволяет проводить лечение когда корни и связки еще формируются
 - Поддерживает здоровое развитие лица и челюстей

Комфортен для пациента

- Сделан из мягкого медицинского силикона
- Биосовместимость (ISO 10993). Не содержит красителей, пластика, фталатов, смягчителей, латекса, бифенола-А и ароматизаторов.
- Одновременное выравнивание в нескольких плоскостях и коррекция во фронтальном и постериальном отделах вместо многоэтапного лечения



ГЛУБОКИЙ ПРИКУС*



До лечения



После 1 года лечения

ГЛУБОКИЙ ПРИКУС С НЕБНЫМ КОНТАКТОМ*



До лечения



После 1 года лечения

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПРИКУСОТДЕЛЬНЫХ ЗУБОВ**



До лечения



После 15 дней лечения

СКУЧЕННОСТЬ***



До лечения



После 10 месяцев лечения

* Снимки клинических случаев предоставлены: Dr Rita Myrland and Dr Mari Dubland, University of Tromsø, Norway. ** Pellegrino Gioacchino, Management of eruption problems with preformed silicone orthodontic devices Poster presented at: 21. Jahrestagung der Deutsche Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde 25.09 - 27.09 2014; Freiburg, Germany *** Pellegrino Gioacchino, Deep bite correction with a preformed appliance, Poster with oral presentation presented at: 12th Congress of European Academy of Paediatric Dentistry; 5th - 8th June 2014; Sopot, Poland

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

		Молочный прикус	Ранний сменный прикус	Поздний сменный прикус	Ранний постоянный прикус
Глубокий прикус	Сильная		■	■	
	Умеренная		■	■	■
	Слабая		■	■	■
Скученность во фронтальном отделе (резцы и клыки)	Сильная		■	■	
	Умеренная		■	■	■
	Слабая		■	■	■
Перекрытый прикус отдельных зубов во фронтальном отделе	Сильная	■	■		
	Умеренная	■	■		
	Слабая	■	■		
Ротация резцов и клыков	Сильная		■	■	
	Умеренная		■	■	■
	Слабая		■	■	■
Класс II	Сильная		■	■	
	Умеренная		■	■	
	Слабая		■	■	
Перекрытый прикус (задние зубы нижней челюсти находятся полностью с лингвальной стороны задних зубов верхней челюсти)	Сильная	■			
	Умеренная	■			
	Слабая	■	■		
Десневая улыбка (Лечение начинается до прорезывания постоянных центральных резцов верхней челюсти)	Сильная		■		
	Умеренная		■		
	Слабая		■		
Открытый прикус (высокая модель LM-Activator)	Сильная	■	■		
	Умеренная	■	■	■	
	Слабая	■	■	■	

Противопоказания:

- III класс по Энгля
- Смещение средней линии более 3 мм.*
- Очень узкая верхняя зубная дуга*
- Небное прорезывание зубов*
- Полностью прорезавшиеся резцы, которым необходимо торк*
- Интрузия зубов

* Может применяться комбинированное лечение (LM-Activator вместе с другими аппаратами, такими как quad helix)

Лечащий врач несет полную ответственность за диагностику, лечение и оценку возможности использования аппаратов LM-Activator, LM-Trainier и другой продукции LM-Dental для каждого конкретного пациента, а также за результаты любого лечения с аппаратами LM-Activator, LM-Trainier и другой продукцией LM-Dental. Врач несет полную ответственность за выбор аппаратов и другой продукции для каждого конкретного пациента. Пожалуйста, изучите инструкции производителя.



“Мы наблюдаем явные улучшения при глубоком прикусе, сагитальном соотношении моляров и скученности у пациентов.”

Myrland, Rita, et al. "One year treatment effects of the eruption guidance appliance in 7- to 8-year-old children: a randomized clinical trial." *The European Journal of Orthodontics* (2014): cju014. <http://dx.doi.org/10.1093/ejo/cju014>

“Преимущество аппаратов для направления прорезывания зубов заключается не только в том, что они контролируют прорезывание, но и в том, что они работают одновременно над трансверсальным, сагитальным и вертикальным соотношением обеих зубных дуг.”

Keski-Nisula, Katri, et al. "Orthodontic intervention in the early mixed dentition: A prospective, controlled study on the effects of the eruption guidance appliance." *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics* 133.2 (2008): 254-260. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajodo.2006.05.039>

LMActivator 2

Новые преимущества: Усиленная вставка для глубокого прикуса | Улучшенное качество поверхности (A-1, SPI AR-106)

Форма зубной дуги узкой модели LM-Activator 2 соответствует стандартным LM-Активаторам |

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Для выбора размера LM-Activator 2 используется новая линейка LM-OrthoSizer 2. Использовать стандартную линейку LM-OrthoSizer с новыми моделями или новую линейку со стандартными моделями нельзя!



Reinforcement with hard incisal surfaces.



Низкая короткая модель LM-Activator 2

Модель, укороченная в области моляров, для пациентов, у которых вторые моляры еще не прорезались. Поставляется в желтом контейнере.

Размер	Узкая	Узкая - усиленная
35	94235LSN	94235LSNR
40	94240LSN	94240LSNR
45	94245LSN	94245LSNR
50	94250LSN	94250LSNR
55	94255LSN	94255LSNR
60	94260LSN	94260LSNR
65	94265LSN	94265LSNR
70	94270LSN	94270LSNR



Низкая длинная модель LM-Activator 2

Модель с удлиненной областью моляров для пациентов, у которых уже прорезались вторые моляры. Поставляется в синем контейнере.

Размер	Узкая	Узкая - усиленная
35	94235LLN	94235LLNR
40	94240LLN	94240LLNR
45	94245LLN	94245LLNR
50	94250LLN	94250LLNR
55	94255LLN	94255LLNR
60	94260LLN	94260LLNR
65	94265LLN	94265LLNR
70	94270LLN	94270LLNR



Высокая короткая модель LM-Activator 2

Модель, укороченная в области моляров, для пациентов, у которых вторые моляры еще не прорезались. Поставляется в оранжевом контейнере. Высокая модель, утолщенная в области вторых премоляров и моляров. Эта модель специально разработана для лечения скелетных и зубочелюстных аномалий при открытом прикусе.

Размер	Узкая	Узкая - усиленная
35	94235HSN	94235HSNR
40	94240HSN	94240HSNR
45	94245HSN	94245HSNR
50	94250HSN	94250HSNR
55	94255HSN	94255HSNR
60	94260HSN	94260HSNR
65	94265HSN	94265HSNR
70	94270HSN	94270HSNR



Высокая длинная модель LM-Activator 2

Модель с удлиненной областью моляров для пациентов, у которых уже прорезались вторые моляры. Поставляется в зеленом контейнере. Высокая модель, утолщенная в области вторых премоляров и моляров. Эта модель специально разработана для лечения скелетных и зубочелюстных аномалий при открытом прикусе.

Размер	Узкая	Узкая - усиленная
35	94235HLN	94235HLNR
40	94240HLN	94240HLNR
45	94245HLN	94245HLNR
50	94250HLN	94250HLNR
55	94255HLN	94255HLNR
60	94260HLN	94260HLNR
65	94265HLN	94265HLNR
70	94270HLN	94270HLNR

LMActivator

Используется сотнями тысяч пациентов по всему миру | Научно и клинически доказанная эффективность



Низкая короткая модель LM-Activator

Модель, укороченная в области моляров, для пациентов, у которых вторые моляры еще не прорезались. Поставляется в желтом контейнере.

Размер Код заказа

10	94010LS
15	94015LS
20	94020LS
25	94025LS
30	94030LS
35	94035LS
40	94040LS
45	94045LS
50	94050LS
55	94055LS
60	94060LS
65	94065LS
70	94070LS



Низкая длинная модель LM-Activator

Модель с удлиненной областью моляров для пациентов у которых уже прорезались вторые моляры. Поставляется в синем контейнере.

Размер Код заказа

40	94040L
45	94045L
50	94050L
55	94055L
60	94060L
65	94065L
70	94070L



Высокая короткая модель LM-Activator

Модель, укороченная в области моляров, для пациентов, у которых вторые моляры еще не прорезались. Поставляется в оранжевом контейнере. Высокая модель, утолщенная в области вторых премоляров и моляров. Эта модель специально разработана для лечения скелетных и зубочелюстных аномалий при открытом прикусе.

Размер Код заказа

20	94020HS
25	94025HS
30	94030HS
35	94035HS
40	94040HS
45	94045HS
50	94050HS
55	94055HS
60	94060HS
65	94065HS
70	94070HS



Высокая длинная модель LM-Activator

Модель с удлиненной областью моляров для пациентов, у которых уже прорезались вторые моляры. Поставляется в зеленом контейнере. Высокая модель, утолщенная в области вторых премоляров и моляров. Эта модель специально разработана для лечения скелетных и зубочелюстных аномалий при открытом прикусе.

Размер Код заказа

45	94045H
50	94050H
55	94055H
60	94060H
65	94065H
70	94070H

СТАРТОВЫЙ НАБОР LM-ACTIVATOR

Стартовый набор содержит все необходимое для начала работы с аппаратом. Все стартовые наборы включают аппараты разных размеров.



Стартовый набор LM-Activator 2
- Модель: Низкая короткая, узкая
94500LSNR

Стартовый набор LM-Activator 2
- Модель: Низкая длинная, узкая
94500LLNR

Стартовый набор LM-Activator 2
- Модель: Высокая короткая, узкая
94500HSNR

Стартовый набор LM-Activator 2
- Модель: Высокая длинная, узкая
94500HLNR

НОВЫЕ МОТИВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Новые информационные материалы для детей и родителей, в которых в веселой и понятной форме, с картинками, рассказывается о том, что такое LM-Активатор. Эти материалы будут отличным дополнением к беседе врача с маленьким пациентом и его родителями.

Также разработан новый дневничок учета ношения для детей постарше.



МОТИВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Желание пациента необходимо для успешного лечения. Первый месяц очень важен для адаптации к ношению аппарата (так как выработка привычки в среднем занимает 3-4 недели). Для мотивации пациента и его родителей разработаны специальные материалы. Важно объяснить пациенту и его семье, что регулярное ношение - это залог успеха, а перерывы и несоблюдение режима равносильны отсутствию лечения.



Брошюра для клиник M1061EN



Инструкции для пациента LM 94533 15 шт.



Подарочные карточки
 LM 94511 Скейтбордист, 65 шт.
 LM 94512 Футболист, 65 шт.
 LM 94513 Велосипедист, 65 шт.
 LM 94514 Наездник, 65 шт.



Мотивационный материал LM 94531
 Постер и наклейки, 15 шт.
 - Плакат для наблюдения за дневным и ночным ношением. Сделан в виде игры, где каждый день отмечается наклейкой, как знак успешного ношения.

ЛИНЕЙКА LM-ORTHOSIZER

Линейка LM-OrthoSizer предназначена для выбора подходящего размера LM-Активатора. Может использоваться как с ручкой, так и без

LM-Активатор, выбранный с помощью линейки, необходимо обязательно примерить пациенту и убедиться, что аппарат подходит.



Линейка LM-OrthoSizer
 LM 942526 Линейка LM-OrthoSizer с ручкой
 LM 9400 Линейка LM-OrthoSizer без ручки

- Измеряет расстояние между верхними резцами (от дистального края левого бокового резца до дистального края правого бокового резца)
- Линейка подходит также к ручкам для зеркал:
- LM 25 ES
- LM 25 XSI
- LM 25 SI

НОВИНКА



Линейка LM-Activator 2
 LM 9402 Линейка LM-OrthoSizer 2 без ручки

- Линейка LM-OrthoSizer 2 предназначена для выбора подходящего размера LM-Активаторов второго поколения (LM-Activator 2).
- Измеряет расстояние между верхними резцами (от дистального края левого бокового резца до дистального края правого бокового резца) на верхней и на нижней челюстях.

LMTrainer



Трейнер LM, средний LM 94100T

- Ячейки для резцов и клыков
- Губной бампер



Трейнер LM-Trainer 2 M LM 94100T2



Трейнер LM, маленький LM 94100S

- Ячейки для резцов, губной бампер
- Меньше и мягче, чем трейнер LM, средний



Трейнер для брекетов LM-Trainer Braces LM 94100TB

- Используется вместе с брекетами
- Корректирует нижнюю челюсть по Классу II
- Предотвращает раздражение и повреждение мягких тканей
- Губной бампер

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Похожая на зонд рабочая часть может использоваться как для надевания, так и для снятия лигатур. Лигатуры могут быть выровнены по нижнему краю зубов. Раздвоенный конец инструмента подходит для надевания лигатурных колец, например, на четвертое крыло брекета.

Ручка для зеркала, ортодонтическая

LMErgoSense LM 25-26 ES
LMErgoMax LM 25-26 XSI

- Для измерения вертикального перекрытия и сагитальной щели
- Миллиметровая шкала, длина 25 мм



Инструмент для снятия/надевания лигатур SL

LMErgoSense LM 414-17CL ES
LMErgoMax LM 414-17CL XSI



Инструмент для фиксации эластичных лигатур

LMErgoSense LM 416-417 ES
LMErgoMax LM 416-417 XSI
LMErgoNorm LM 416-417 SI



Подгибание дуги может вызывать трудности из-за ограниченности пространства и жесткости дуги. Специальный инструмент облегчит эту задачу: в отверстия диаметром 1 мм в рабочей части продевается дуга, а затем дуга подгибается. Плечо инструмента достаточно длинное, что позволяет работать в узких пространствах.

Инструмент для подгибания дуги

LMErgoSense LM 412-413 ES
LMErgoMax LM 412-413 XSI



Инструмент для наложения элементов ортодонтических конструкций

LMErgoSense LM 414-415 ES
LMErgoMax LM 414-415 XSI



Инструмент для наложения элементов ортодонтических конструкций

LMErgoSense LM 414-150 ES
LMErgoMax LM 414-150 XSI
LMErgoNorm LM 414-150 SI


СИСТЕМА МОДУЛЕЙ LM-SERVOMAX

LM-ServoMax – оптимальная работа и хранение.

Система LM-ServoMax организует и рационализирует работу со стоматологическими инструментами и материалами во время лечебных процедур и последующей стерилизации. Система треев LM-ServoMax обеспечивает высокий инфекционный контроль и экономит время, а также продлевает срок службы инструментов и облегчает работу персонала. Разнообразие совместимых модулей позволяет хранить все инструменты и аксессуары в одном месте. Система адаптируется под индивидуальные требования каждого специалиста.



Рациональный уход с минимальными усилиями

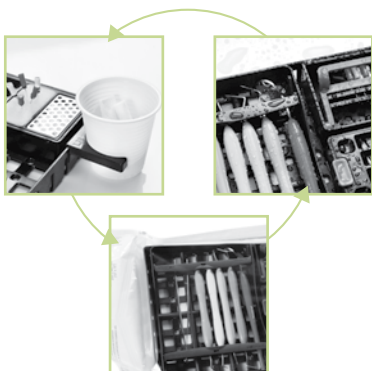

МОДУЛИ LM-SERVOMAX

■ Все модули имеют универсальный дизайн и стандартные размеры. Кассеты изготовлены из исключительно долговечного специального пластика, который выдерживает все стандартные процедуры и средства для очистки и стерилизации (макс. 134 °C / 273°F). Модули продаются пустыми.



Большой бокс LM-ServoMax
LM 6410

- Включает: 1 набор универсальных фиксаторов и 2 металлические клипсы
- Размеры: 288 x 185 x 29 мм



Универсальные фиксаторы LM-ServoMax,
2 шт.
LM 6416



Металлические клипсы LM-ServoMax, 2 шт.
LM 6415

- Для фиксации кассет LM-Servo 5 или LM-Servo 8 в модулях LM-ServoMax

ДЛЯ АКСЕССУАРОВ



Стандартный бокс LM-ServoMax
LM 6420



Кассета для реставрационных и эндо материалов LM-ServoMax
LM 6430



Кассета для ультразвуковых насадок LM-ServoMax
LM 6460

- Для 6 ультразвуковых насадок



Кассета для боров и эндофайлов LM-ServoMax
LM 6450

- Для 8 боров и 14 файлов
- Имеет регулировочную и измерительную шкалу для файлов



Держатель для шприца LM-ServoMax
LM 6495

- Бокс для безопасного размещения шприца для анестезии



Держатель для стакана
LM-ServoMax
LM 6490



Держатель для
инструментов LM-ServoMax

- LM 6471 черный
- LM 6472 оранжевый
- LM 6473 голубой
- LM 6474 красный
- LM 6475 зеленый

- Фиксаторы для инструментов с цветовой кодировкой для системы LM-ServoMax
- Размер может регулироваться в зависимости от длины инструментов
- Набор 2 шт. (одного цвета)

КАССЕТЫ LM-SERVO

■ В кассетах LM-Servo инструменты закреплены фиксатором, но при этом свободно вращаются, обеспечивая оптимальную очистку и гарантируя инфекционный контроль.

Кассеты могут быть отмечены цветными кодовыми кнопками и закреплены в большом боксе LM-ServoMax с помощью металлических клипс (LM 6415).



Кассета для инструментов LM-Servo 5
LM 6650

- Для 5 инструментов
- Размеры: 180 x 86 x 28 мм



Кассета для инструментов LM-Servo 8
LM 6680

- Для 8 инструментов
- Размеры: 180 x 136 x 28 мм.

КАССЕТЫ LM-SERVO E

■ Новая серия кассет LM-Servo разработана для улучшения безопасности и проверки инструментов. Кассета оснащена специальными шторками для защиты лезвий от поломок, а персонала от порезов. Возможность оснастить кассеты специальным чипом RFID делает их частью уникальной системы контроля LM Dental Tracking System™. Кассеты могут быть отмечены цветными кодовыми кнопками и закреплены в большом боксе LM-ServoMax с помощью металлических клипс (LM 6417).

НОВИНКА

Кассета LM-Servo 5E

- LM 6551 серый
- LM 6552 голубой
- LM 6553 зеленый
- LM 6554 желтый

- Для 5 инструментов
- Кассета оснащена защитными шторками
- Размеры: 180 x 83 x 26 мм

НОВИНКА

Кассета LM-Servo 8E

- LM 6581 серый
- LM 6582 голубой
- LM 6583 зеленый
- LM 6584 желтый

- Для 8 инструментов
- Кассета оснащена защитными шторками
- Размеры: 180 x 133 x 26 мм

КОДОВЫЕ КОЛЬЦА И КНОПКИ

Кодовые кнопки

- LM 6000 голубой
- LM 6001 зеленый
- LM 6002 оранжевый
- LM 6003 красный
- LM 6004 желтый
- LM 6004 коричневый

- На каждой стороне кассеты Servo есть три отверстия для кодовых кнопок
- Упаковка 20 шт. (одного цвета)



Кодовые кольца

- LM 5000 голубой
- LM 5001 зеленый
- LM 5002 оранжевый
- LM 5003 красный
- LM 5004 желтый
- LM 5005 черный
- LM 5006 белый
- LM 5007 коричневый
- LM 5008 лиловый
- LM 5009 розовый
- LM 5010 темно-серый
- LM 5011 лаймовый

- Для кодировки ручных инструментов
- Упаковка 50 шт. (одного цвета)

Система контроля за инструментами

Уникальная интеллектуальная RFID- технология

Компания LM долгое время является пионером в области разработки стоматологических инструментов. Постоянная совместная работа со стоматологическими клиниками выявила существование у них трудностей в учете материалов и инструментов. Внутренний учет и обслуживание инструментов могут быть организованы более эффективно и в соответствии со всевозрастающими требованиями к безопасности пациентов.

При разработке новых инструментов ErgoSense специалисты компании LM руководствовались идеей создания «интеллектуального инструмента». В дополнение к эргономике, новые инструменты предоставляют возможность улучшить контроль и безопасность лечения пациентов в клинике. Специальные RFID-чипы могут быть интегрированы во все инструменты с ручками LM-ErgoSense. Использование RFID-технологии позволяет получать полную информацию об использовании каждого инструмента с помощью сканирования чипа.

Встроенные чипы вместе со сканером и специальным программным обеспечением составляют уникальную Систему учета и контроля (Dental Tracking System), которая позволяет улучшить процессы управления клиникой и делает более эффективным и прозрачным документооборот.

Уникальная система учета и контроля позволит вам эффективно отслеживать и регулировать оборот материалов и инструментов в клинике, сокращая расходы и уменьшая время работы персонала. Система помогает оптимизировать график закупок, максимально использовать инструменты и следить за их состоянием и функциональными характеристиками. С помощью данной системы вы также сможете быть уверены, что врачи используют только инструменты прошедшие стерилизацию, что увеличит безопасность пациентов.

Знание -
сила.



ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ – МАШИНКА ДЛЯ ЗАТОЧКИ LM-RONDOPLUS

Инструменты, используемые на твердых тканях зуба, быстро затупляются, снижая эффективность лечения. Пародонтологические инструменты необходимо затачивать регулярно.



Быстро и просто

- Рабочая часть инструмента удерживается в правильном положении, вращается только точильный камень
- Заточка одного инструмента занимает всего несколько секунд

Универсально

- Для пародонтологических и терапевтических инструментов
- Подходит как для левшей, так и для правшей
- Можно выбрать направление вращения шлифовального камня

Аккуратно и безопасно

- Двухуровневый упор для инструментов. Верхнее положение - для терапевтических инструментов, нижнее - для пародонтологических
- Сохраняется исходная форма рабочей части
- Невысокая скорость вращения камня - рабочая часть инструмента не будет нагреваться

В комплекте поставляется мелкозернистый (400) керамический камень. Шлифовальные камни большей и меньшей зернистости можно заказать отдельно

МАШИНКА ДЛЯ ЗАТОЧКИ LM-RONDOPLUS



Обучающий CD-диск и инструкция на русском языке входят в комплект!

Машинка для заточки LM-RondoPlus LM 8600

В комплект входит:

Машинка для заточки, педаль ножного управления, камень для заточки (зернистость - 400), 2 тестера LM-Fingo, 5 наждачных полосок, инструкция на CD и руководство пользователя.



На машинке расположен тестер LM-Fingo, с помощью которого можно проверить остроту инструмента. Тестер может использоваться на машинке или может быть одет на палец (универсальный размер). LM-Fingo сделан из акрилового пластика.

Запасные части

Шлифовальные камни

- LM 8660 - зернистость 600 grit (белый)
- LM 8640 - зернистость 400, более грубый (серый)
- LM 8632 - зернистость 320, самый грубый (черный)

LM 8630 Педаль

LM 8602 Тестер LM-Fingo, 2 шт.

LM 8550 Наждачные полоски, 5 шт.

LM 8606 Тестер LM-Fingo, 6 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ

1. Пре-дезинфекция

Не оставляйте инструменты сухими, поместите их в дезинфицирующий раствор сразу, как это станет возможным. Обратите особое внимание на точность дозировки и время обработки. При использовании термодезинфектора пропустите пункты 1-5.

2. Промывка

Тщательно промойте инструменты под струей теплой воды.

3. Очистка

В промывочной машине.
Вручную: Смойте видимые загрязнения теплой водой. Используйте мягкую щетку и моющее средство. Ультразвуковая ванна: поместите инструменты в кассету, чтобы не повредить их.

4. Промывка

Тщательно промойте инструменты под струей теплой воды.

5. Сушка

Перед стерилизацией инструменты необходимо высушить.

6. Осмотр и заточка инструментов


Заточите, почините или замените инструменты в случае необходимости.

7. Упаковка

Запакуйте обработанные инструменты перед стерилизацией.

8. Стерилизация

Автоклав: поместите чистые, сухие и упакованные инструменты в автоклав. Температура обработки - макс. 180 °C/355 °F. Внимание! Для инструментов для удаления максимальная температура - 134 °C/273 °F

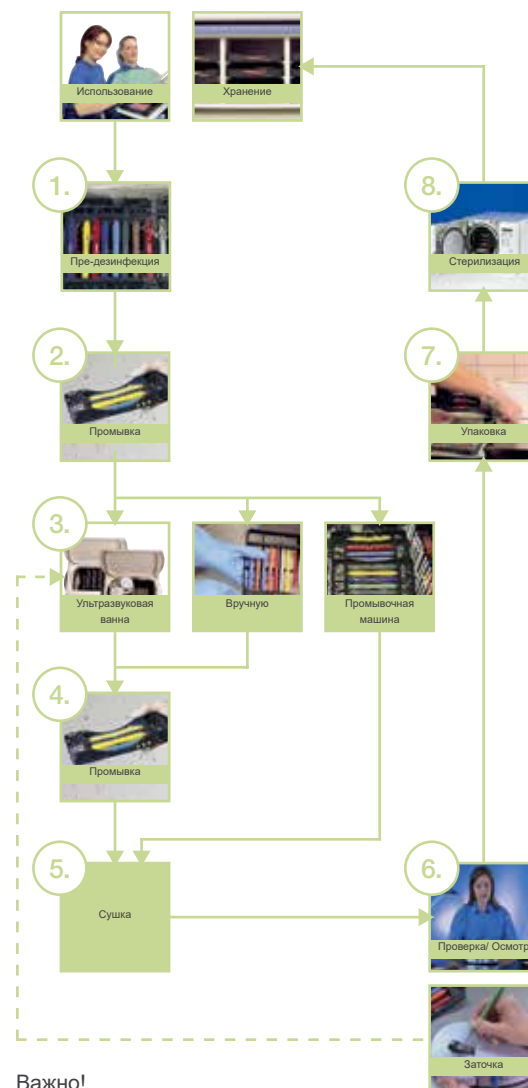

Важно!

- Регулярно проверяйте исправность оборудования
- Следуйте всем пользовательским инструкциям
- Уделяйте особое внимание дозировке и времени обработки
- Используйте кассеты LM-Servo для защиты инструментов

LM Dental

LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

